



คู่มือการใช้งาน
โคมไฟส่องตรวจ LED 9 วัตต์ (พร้อมแบตเตอรี่สำรอง)
รุ่น UQ6001-L3 (B)





โคมไฟส่องตรวจ LED 9 วัตต์ (พร้อมแบตเตอรี่สำรอง)
รุ่น UQ6001-L3 (B)



วัตถุประสงค์

1. ใช้สำหรับให้แสงสว่างในงานตรวจ/ผ่าตัด
2. เป็นโคมไฟผ่าตัดให้แสงสว่างแบบส้อเลื่อน LED แบบแขนสมดุล
3. ให้แสงสว่างในระยะการใช้งาน โยกหัวโคมขึ้นลงประมาณ 45 องศา, ระยะปรับในการใช้งาน 50 ซม.
4. ให้แสงที่สม่ำเสมอ ไม่มีอุณหภูมิและความร้อนเกิดขึ้นในขณะที่ทำการผ่าตัด
5. ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไฟฮาโลเจนถึง 3 เท่า



คุณลักษณะทั่วไป

1. ฐานผลิตจากอลูมิเนียม 5 แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 เซนติเมตร พร้อมล้อ
2. แกนเสาผลิตจากสแตนเลส ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน ความสูงประมาณ 135 เซนติเมตร จากฐานล้อเลื่อน และความสูงจากพื้น ประมาณ 148 เซนติเมตร
3. แขนโคมไฟปรับขึ้นได้ประมาณ 45 องศา ปรับลงได้ประมาณ 60 องศาปรับหมุนได้รอบแกนประมาณ 360 องศา
4. เส้นผ่าศูนย์กลางโคม 5 เซนติเมตรมีมือจับพร้อมปลอกยางซิลิโคนหุ้มสำหรับนั่งฆ่าเชื้อ
5. เส้นผ่าศูนย์กลางแสงในระยะโฟกัส 1 เมตร
6. ใช้หลอด LED จำนวน 3 ดวงอายุใช้งานของหลอด 50,000 ชั่วโมง

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V. 50 Hz. แปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ไม่เกิน 7.4V.
2. มีเบตเตอร์รีตารองขนาด 4.4 A. สามารถใช้งานกรณีไฟดับได้ไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมงใช้เวลาชาร์จไฟบ้าน 220 V. ประมาณ 3-4 ชั่วโมง
3. ความส่องสว่างเป็น 45,500 ลักซ์ ณ ระยะใช้งานความสูง 41 ซม.
4. อุณหภูมิพื้นผิวของแสง 4-6,000 เคลวิน

วิธีการใช้งาน

1. เสียบปลั๊กไฟ 220 v. เพื่อจ่ายไฟเข้าสู่ชุดกล่องควบคุม
2. เปิดสวิตช์ POWER ซึ่งอยู่ด้านบนกล่องควบคุม
3. หมุนปรับ VOLUME (ปรับความสว่างของแสงตามความต้องการ)
4. ก่อนจะปิดโคมไฟให้ปรับ DIMMER หรือแสงไฟให้อ่อนลงก่อนแล้วค่อยปิดเพื่อป้องกันหลอดไฟขาด และเป็นการยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ

หมายเหตุ

- ในกรณีไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง โคมไฟจะตัดการทำงานมาเป็นระบบเบตเตอร์รีตารองทันที เพื่อที่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
- ในกรณีที่ใช้ระบบเบตเตอร์รีตารองหมดสนิท จำเป็นต้องกดสวิตช์เซ็ทเครื่องที่อยู่ด้านใต้ ของกล่องควบคุม โดยให้กดค้างไว้ ประมาณ 5 วินาที



บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด

เลขที่ 22 ซอยรามคำแหง 8 แยก 2 (ห้าพี่น้อง) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-314-1500 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) แฟกซ์. 02-314-1800

E-Mail: sales.universalquality@gmail.com, Web site : www.universal-quality.co.th, Line ID : uq.support