

Resusci[®] Baby

Directions for Use

Page 2-5

Gebrauchsanweisung

Seite 6-9

Mode d'emploi

Page 10-13

Instrucciones de utilización

Páginas 14-17


Istruzioni per l'Uso

Pagine 18-21

Handleiding

Blz. 22-25

คู่มือการใช้

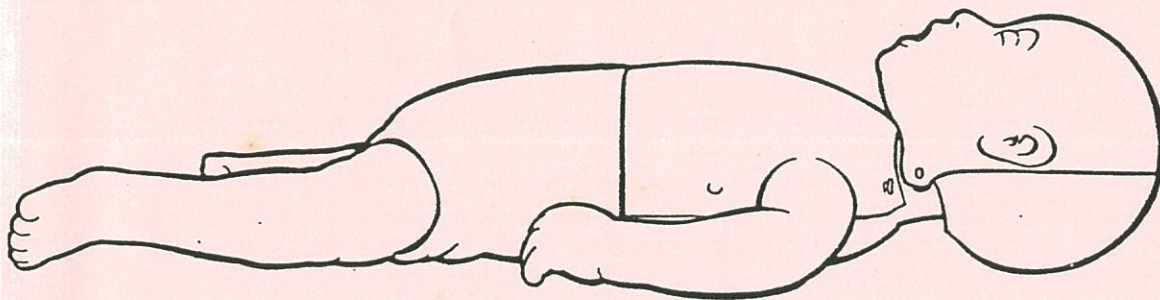

Laerdal
helping save lives



บริษัท เบอร์ลีเยกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

แผนก Medical Supply

โทร. 367-1274-7 แฟกซ์ : 381-4551



Laerdal
helping save lives

Skillguide Signal Box

Skillguide Signal Box จะแสดงผลการฝึกเป็นสัญญาณไฟ ซึ่งจะช่วยให้ครูฝึกและผู้ฝึกเกิดความชำนาญในการฝึก เมื่อซื้อหุ่น Resusci Baby with skillguide (Cat no. 140011) ท่านจะได้รับ

- Skillguide Signal Box
- ถ่าน alkaline size C 1.5 volt 4 ก้อน

การต่อเชื่อมและการใช้ Skillguide Signal Box


1. เสียบสาย Skillguide เข้ากับข้อต่อทางด้านข้างด้านขวาของหุ่น
2. ดึงแถบกระดาษออกจากถาดแบตเตอรี่ทางด้านหลังของ Signal Box
3. กดปุ่ม "ON" เพื่อเริ่มต้นการฝึก



เครื่อง Skillguide จะปิดอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลา 5 นาที

หมายเหตุ:- เมื่อเปิดเครื่อง Skillguide โดยกดปุ่ม "ON" จะมีสัญญาณไฟสีแดงค้างอยู่ที่ตำแหน่งการนวดหัวใจ เมื่อเครื่อง Skillguide ต่อกับหุ่นอย่างไม่เหมาะสม

สัญญาณไฟที่แสดงบนเครื่อง Skillguide

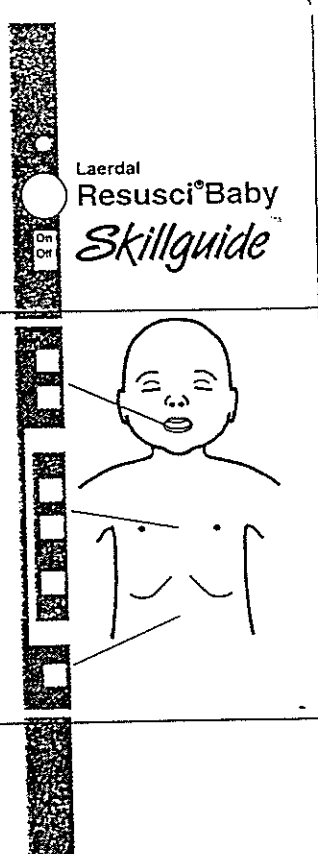				
	Light	Indication	Measurement ^{1,2}	
Ventilation volume:	green	correct	30 ml	1
	orange	too much	50 ml	
Correct compression:	green	correct	.5 in. (13 mm)	2
	orange	too much	1.0 in. (20 mm)	
Wrong finger position:	red	Pressure outside of acceptable area		3
Stomach distention:	red		30 ml ≤ 0.33 secs.	4
			or 50 ml ≤ 1.0 sec.	

¹ Measurement tolerance in the manikin: +/- 15%

² If manikin is used in laboratory tests, remove pants for accurate measurements.

Power Supply

ใช้แบตเตอรี่ Alkaline 1.5 volt size C 4 ก้อน จะสามารถใช้งานได้ประมาณ 125 ชั่วโมง

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ – แนะนำให้ใช้แบตเตอรี่ Alkaline เท่านั้น การเปลี่ยนทำดังนี้

1. วางนิ้วหัวแม่มือลงบนตำแหน่งลูกศร
2. ผลักฝาไปตามลูกศรเพื่อเปิดฝาครอบแบตเตอรี่
3. นำแบตเตอรี่เก่าออกทิ้ง
4. ใส่แบตเตอรี่ใหม่
5. วางฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับถาดแบตเตอรี่
6. เลื่อนฝาครอบปิดถาดแบตเตอรี่

Connection Cable

เครื่อง Skillguide จะใช้สาย Cable ที่มี 8 pin male connector เพื่อต่อเชื่อมกับตัวหุ่นสาย Cable จะมีขนาดความยาว 48 นิ้ว (1.2 เมตร)

การถอดเปลี่ยนหน้าหุ่น

การถอด

1. ปลดหน้าหุ่นออกจากที่ยึดข้างหู



2. ดึงหน้าออกจากที่ล็อก



การติดตั้ง

1. พับหน้าหุ่นขึ้น ผลักหน้าหุ่นให้ล็อกกับข้อต่อของทางเดินหายใจ



2. พับหน้าหุ่นให้คลุมศีรษะหุ่น




3. ดึงหน้าหุ่นเข้ากับที่ยึดข้างหู




การถอดเปลี่ยนทางเดินหายใจ

A. การถอด

1) นำหนังหน้าอกออก

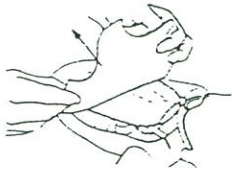

2) ยกแผงหน้าอกขึ้น

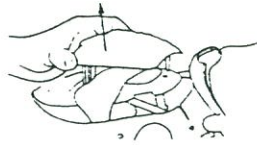

3) ปลดล็อกปอด



4) นำแผงปอดออก




5) นำปอดออก



6) ยกขากรรไกรออกจากหัว



7) ปลดทางเดินหายใจออกจากขากรรไกร

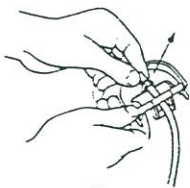

8) นำทางเดินหายใจออกทั้ง




B. การติดตั้ง


1) ใส่ทางเดินหายใจเข้าไปในหัวโดยสอดผ่านคอ




2) ล็อคข้อต่อทางเดินหายใจเข้ากับขากรรไกร

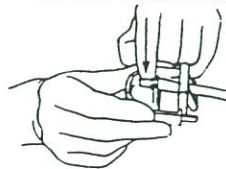

3) ติดตั้งขากรรไกรเข้ากับหัว

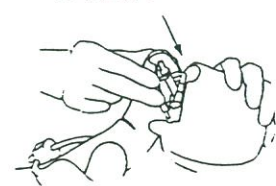

4) ดึงวาล์วและท่อทางเดินหายใจเข้าสู่ร่างกาย ดันวาล์วเข้าไปในรูหลังแผงปอด

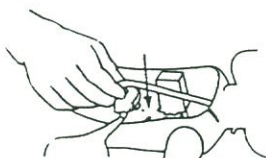


5) วางแผงปอด



6) วางปอดไปบนแผงปอดตามตำแหน่งหมุด



7) ใส่แผงหน้าอก

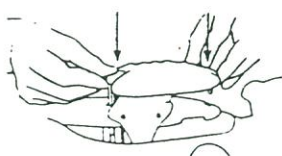

8) ใส่หนังหน้าอก

