


## คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อหุ่น : OG019-1 หุ่นจำลองทารกแรกเกิด

### วิธีการใช้

1. ก่อนใช้งาน ควรทาสารหล่อลื่นทุกครั้งบริเวณตัวหุ่นทารกและรก ( ใช้ในการฝึกกับหุ่นฝึกการคลอดลูกเท่านั้น )
2. นำตัวหุ่นทารกและรกติดตั้งกับหุ่นฝึกการคลอดลูก
3. เริ่มต้นการใช้งาน

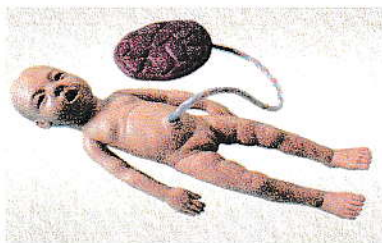

รูปที่ 1



รูปที่ 2

### การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
  - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)
2. หลังการใช้งาน
  - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (ยกเว้นบริเวณบริเวณที่เป็นพลาสติก)
  - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดผนึกให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
  - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
  - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
  - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการชำรุดและเสื่อมสภาพ
  - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้