


TH



# Resusci Junior QCPR

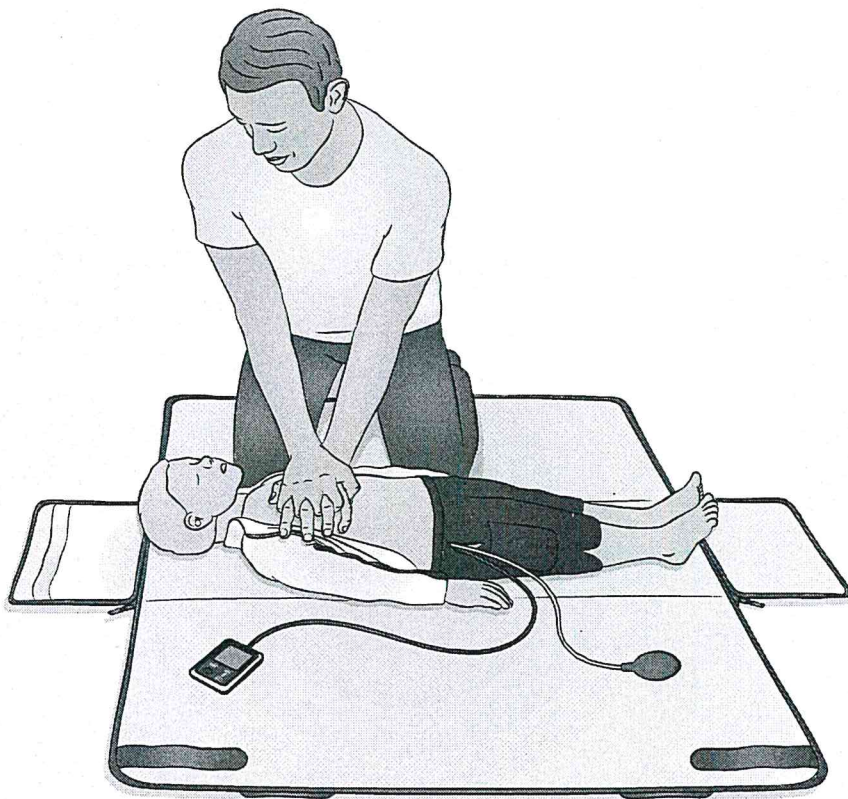


[www.laerdal.com](http://www.laerdal.com)




**Laerdal**  
helping save lives

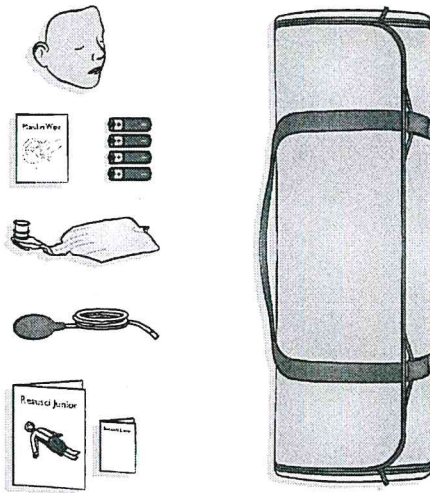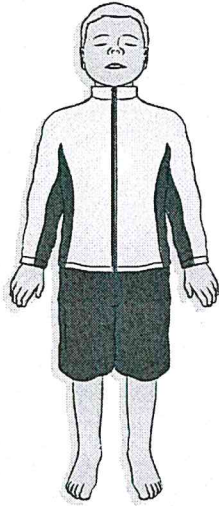


อุปกรณ์ในชุด

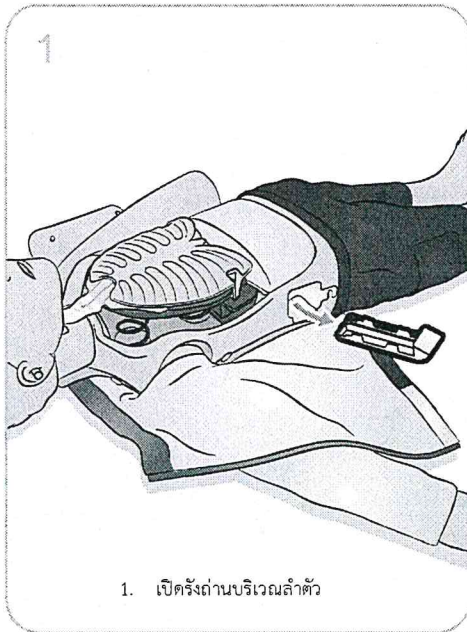


1. เปิดด้านหลังบริเวณลำตัว

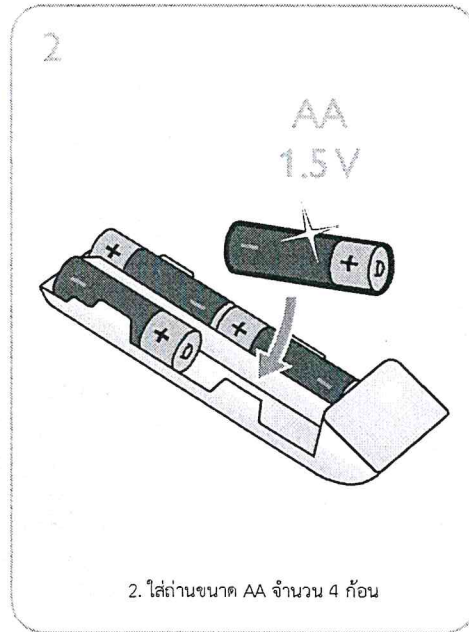


2. ใส่ถ่านขนาด AA จำนวน 4 ก้อน

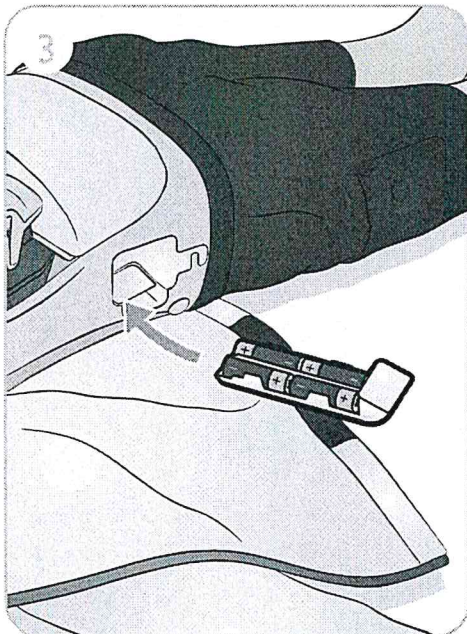

3. ใส่ด้านหลังกลับที่เดิมบริเวณลำตัว

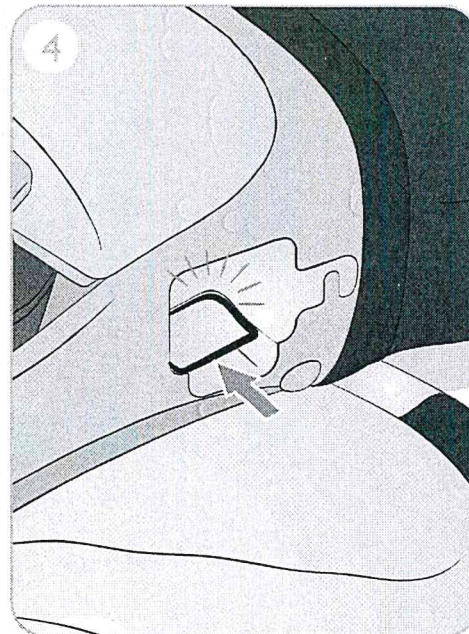


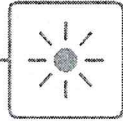

EN

1. สถานะไฟการเปิดหุ้ม
2. มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก
3. แบตเตอรี่ต่ำ (สามารถใช้งานได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)



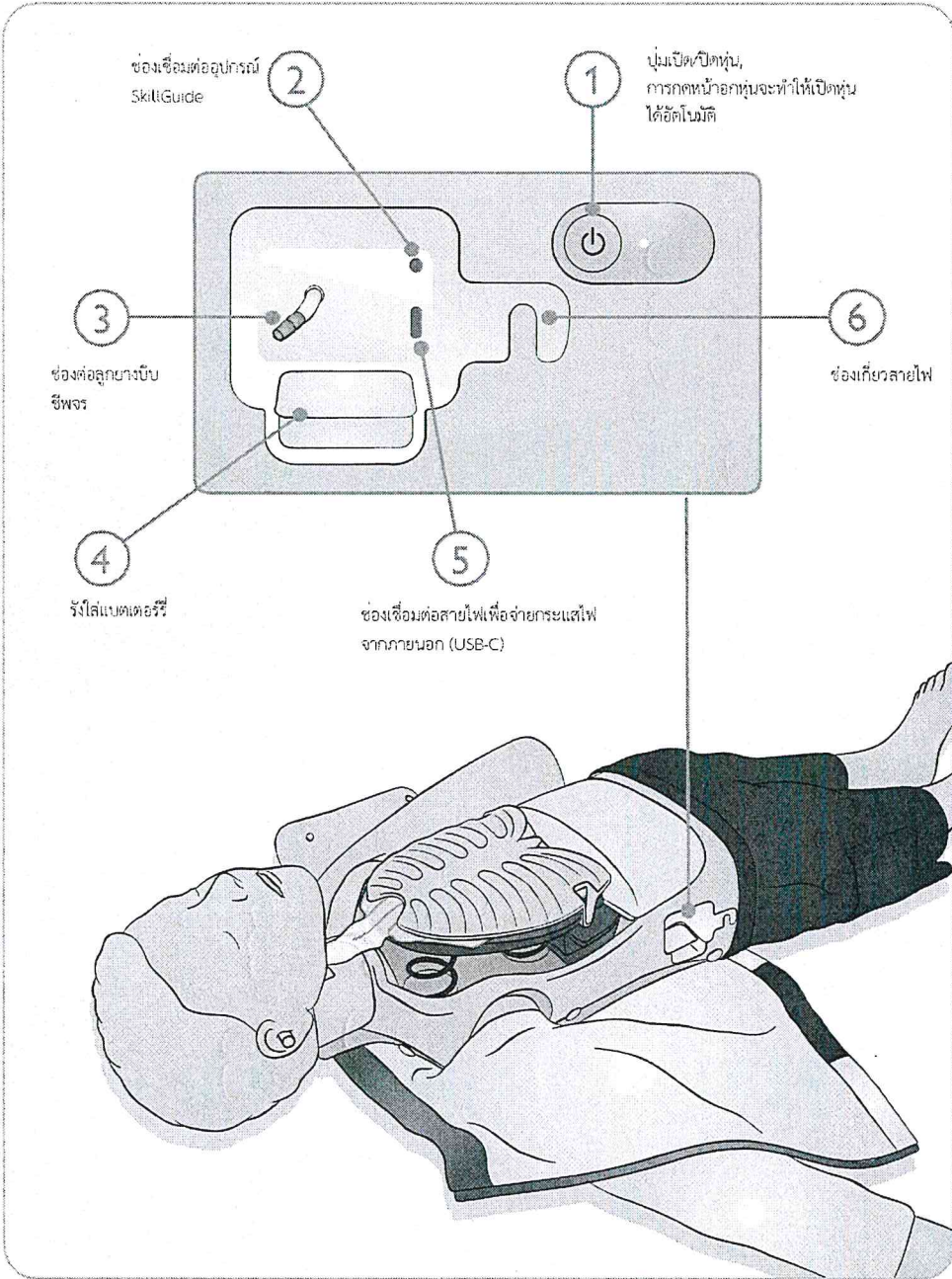




 QCPR Learner  
QCPR Instructor

 QCPR Learner


\*\*สามารถดาวน์โหลด Application ได้จาก Apple Store, หรือ Play Store


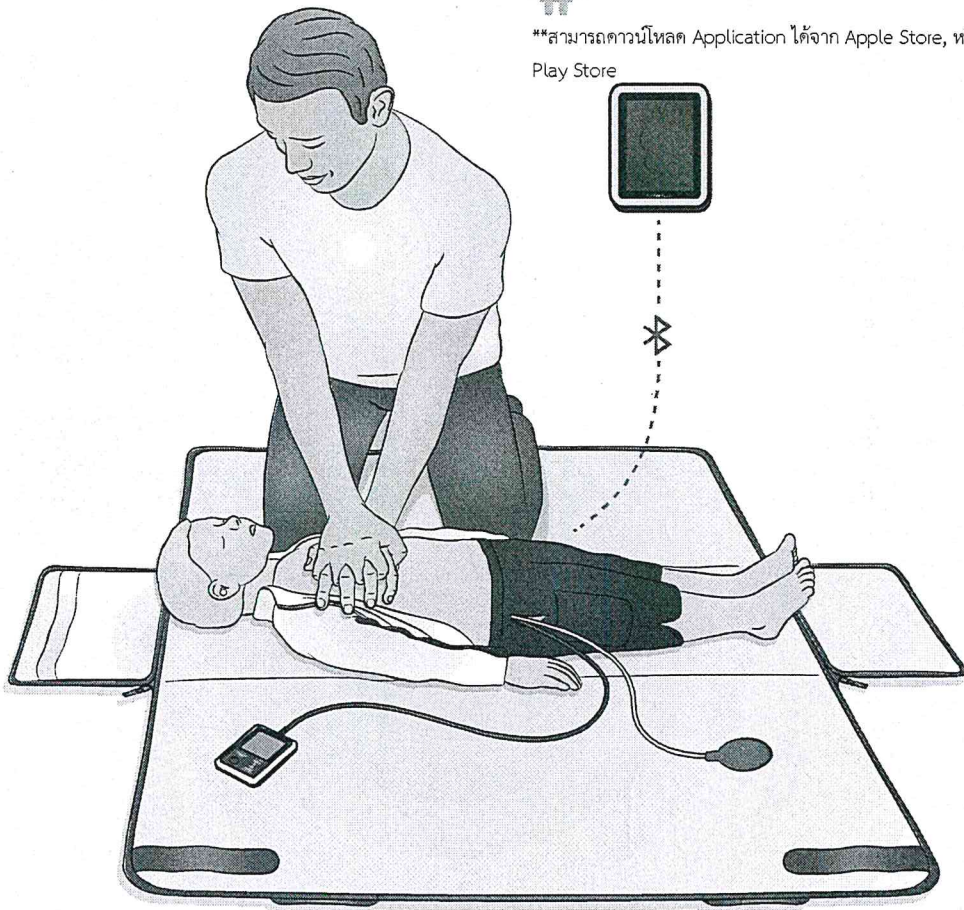






การวัดชีพจรในตำแหน่ง Carotid

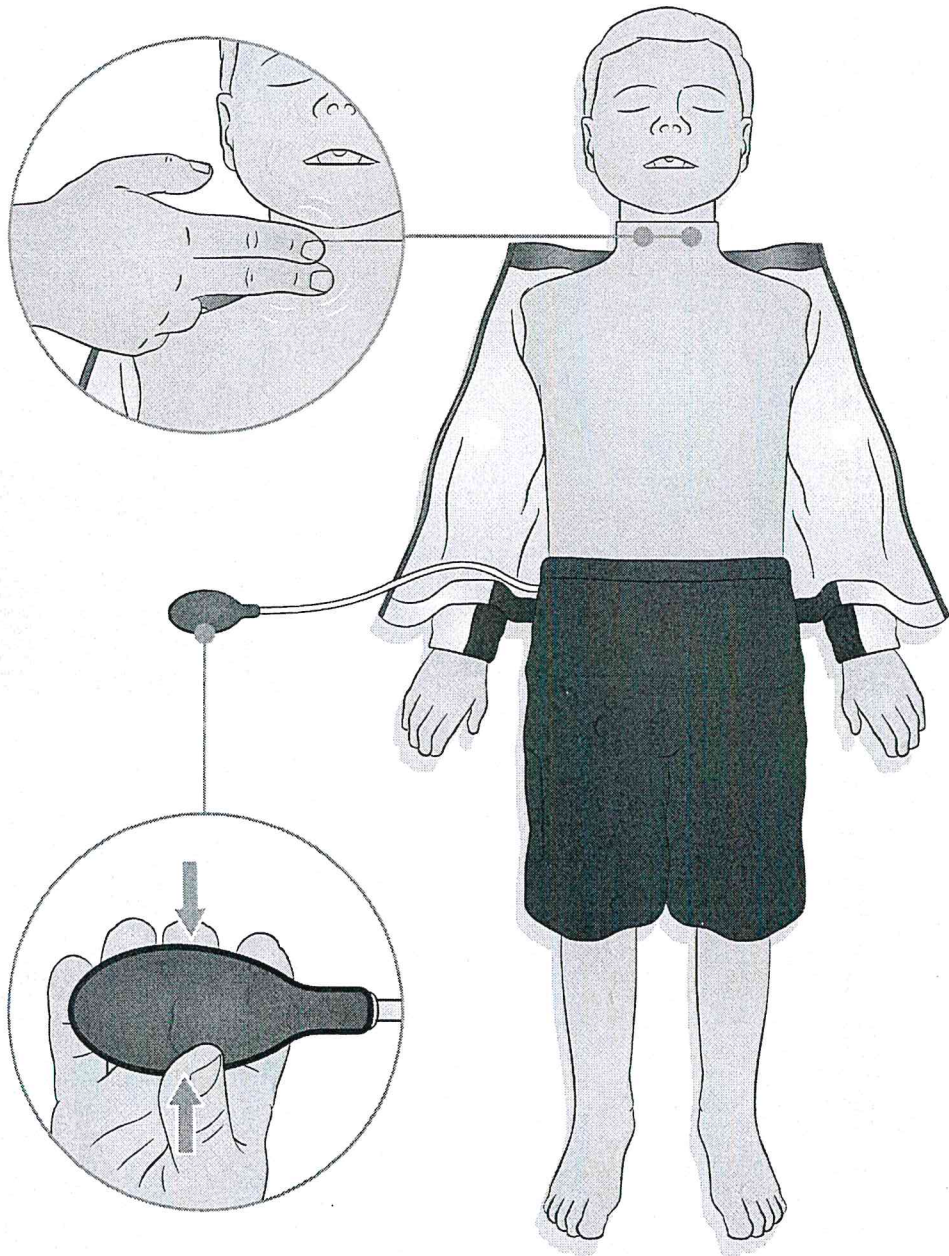

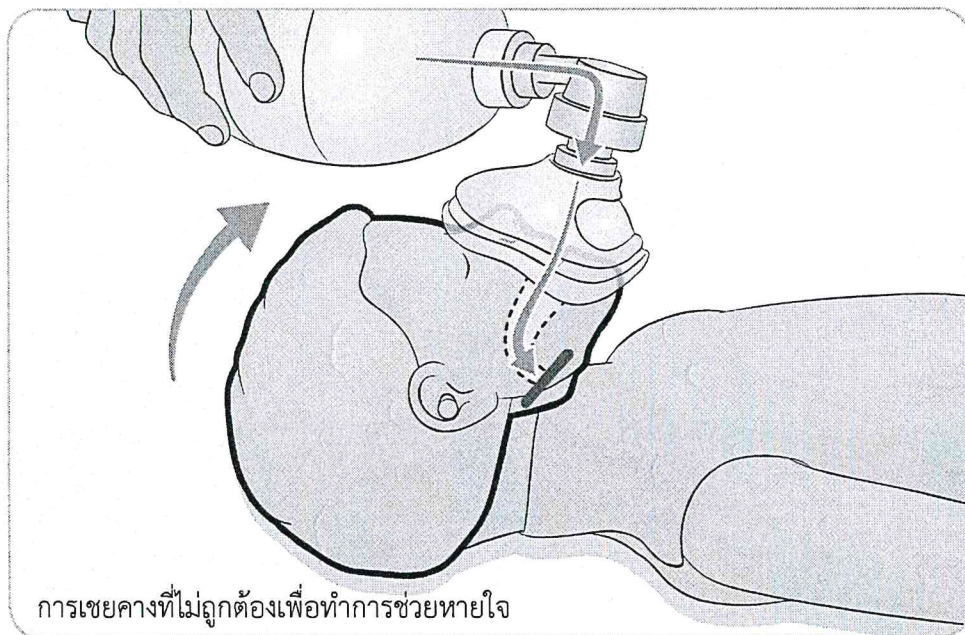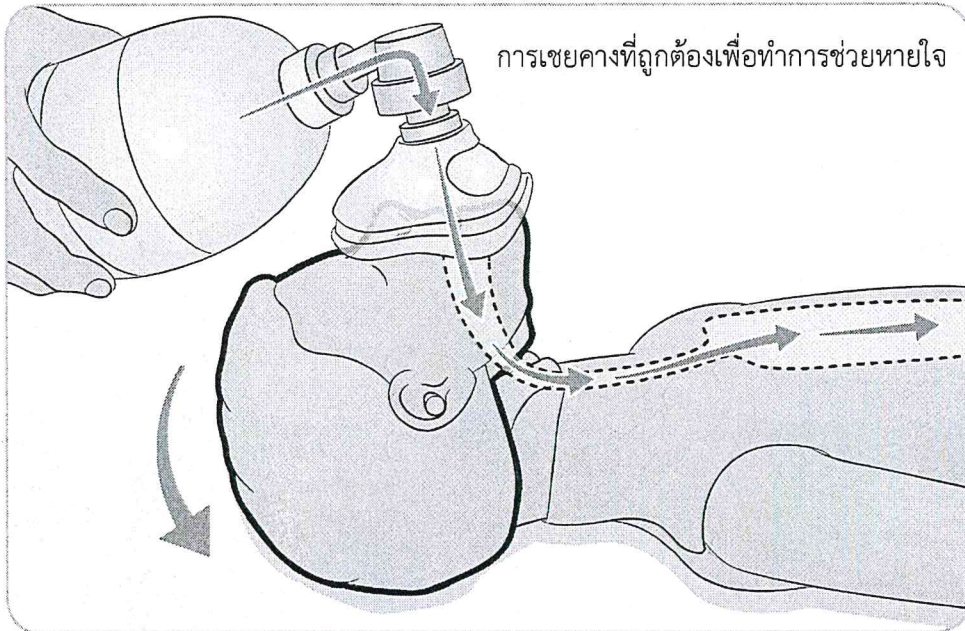






การถอดปอดจำลองเพื่อเปลี่ยน


1 ถอดแผ่นหนังหน้าอกออก




2 ยกชุดซีโครงจำลองขึ้น

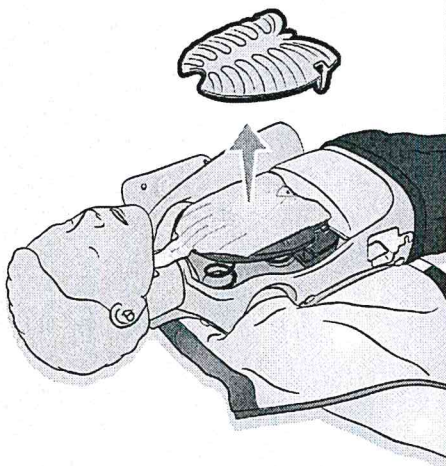


3 ถอดปอดจำลองออก

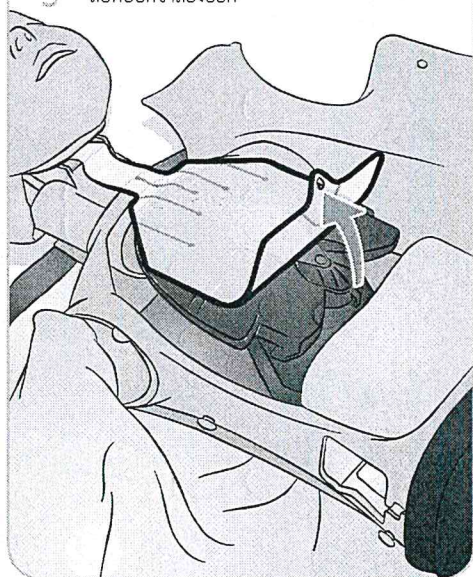


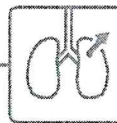


4 ตอดหนึ่งใบหน้าออก

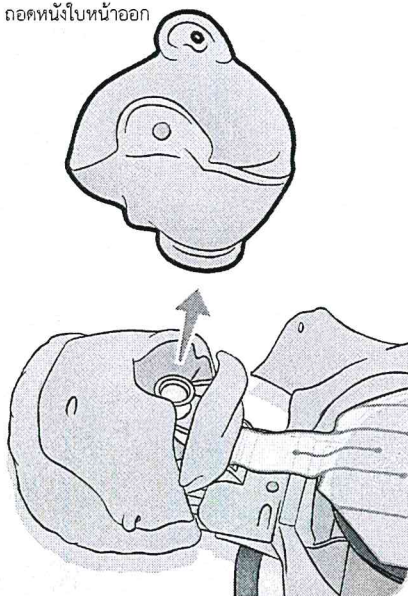


5 ดึงคางออกจากตัวหุ่น

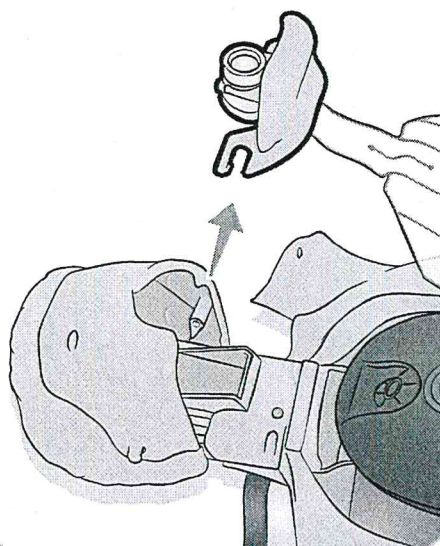


6 ถอดชุดปอดจำลองออกจากชุดคาง

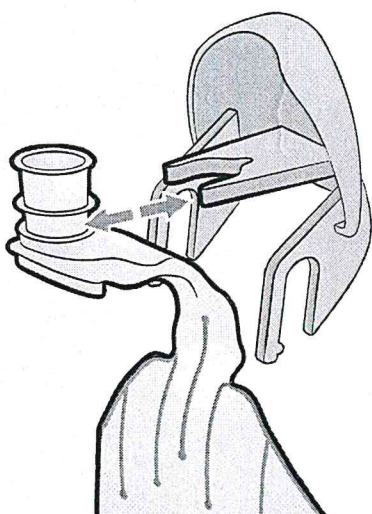


7 นำปอดจำลองที่ชำรุดทิ้งขยะ

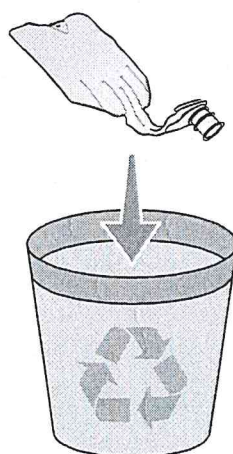




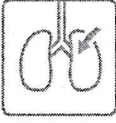


1 นำปอดจำลองชิ้นใหม่ติดตั้งบนชุดคาง

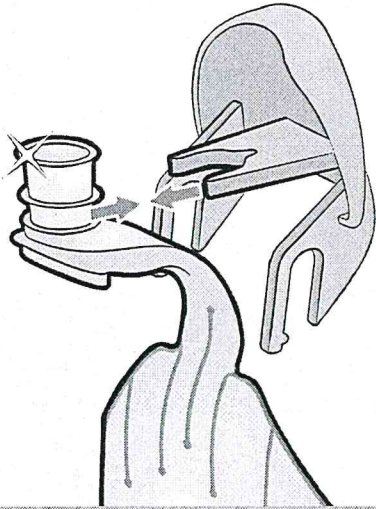

2 นำชุดคางติดตั้งเข้ากับตัวหุ่น

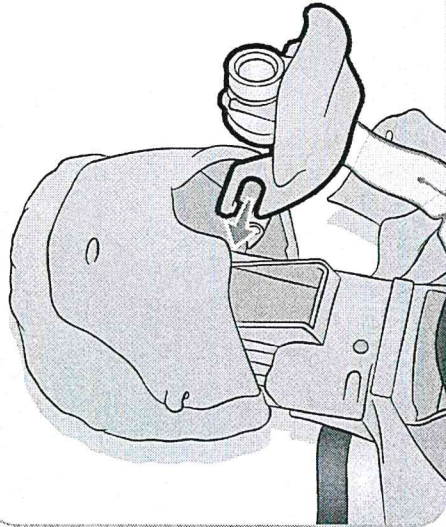

3 ติดตั้งหนังใบหน้าที่ลงบนตัวหุ่น

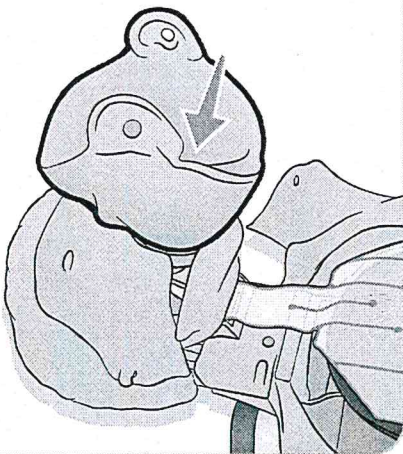

4 ยึดหนังใบหน้าที่เข้ากับหมุดบริเวณหูของหุ่น

