


คู่มือการใช้งาน

หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการดูดเสมหะและการให้อาหารทางสายยาง

Suction Tube Feeding Simulator (LM-097B)

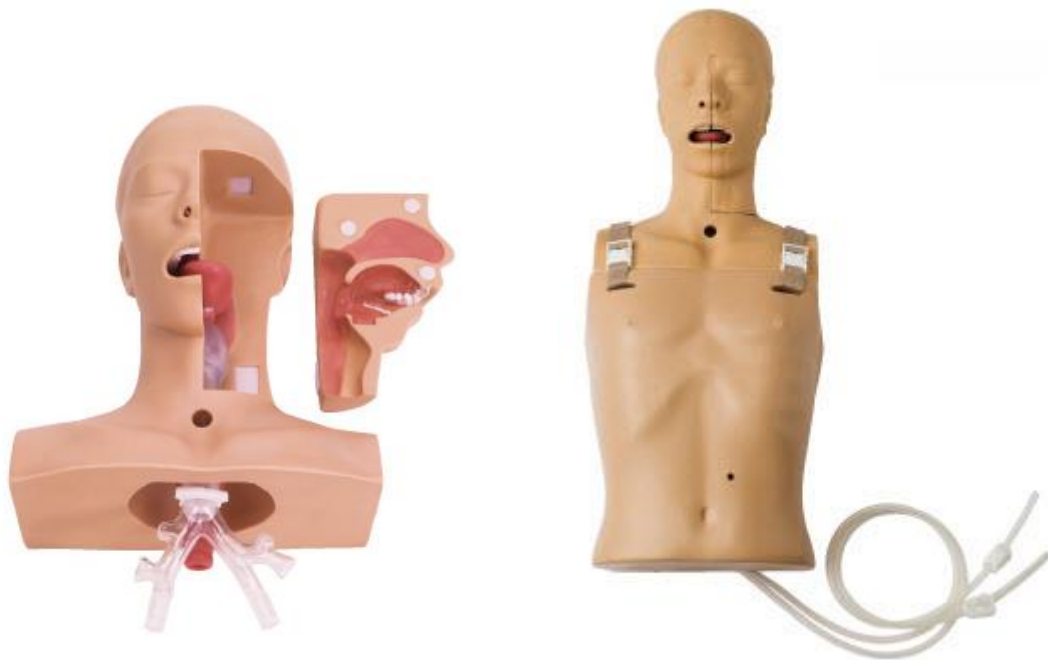

ข้อควรระวัง


1. หุ่นถูกสร้างจากวัสดุที่มีคุณลักษณะอ่อนนุ่ม คล้ายผิวหนังมนุษย์จริงๆ จึงควรปฏิบัติกับหุ่นอย่างระมัดระวังดังเช่นปฏิบัติกับคนไข้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของหุ่นให้ยาวนานขึ้น
2. อุปกรณ์ต่างๆ ที่มากับหุ่นเช่น suction tube, cannula และอื่น ๆ ถูกออกแบบสำหรับการใช้กับหุ่นเท่านั้น ห้ามนำไปใช้กับคนไข้จริงเด็ดขาด
3. ระวังอย่าให้สมหะจำลองที่มากับหุ่น เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เด็ดขาด ไม่ว่าจะทางปากหรือตา

การดูแลรักษาหุ่น


1. ห้ามวางของทับหุ่นเด็ดขาด เพราะจะทำให้หุ่นเสียรูปได้
2. การทำความสะอาดให้ใช้ผ้า gauze ชุบน้ำหรือ สารทำความสะอาดอ่อนๆ ที่มีค่าเป็นกลางผสมน้ำ เช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารจำพวกทินเนอร์และ เบลซึล เด็ดขาด
3. การเก็บหุ่นควรอยู่ในตำแหน่งที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่โดนแสงแดดโดยตรง

การประกอบ

1. การต่อท่อทางเดินหายใจ

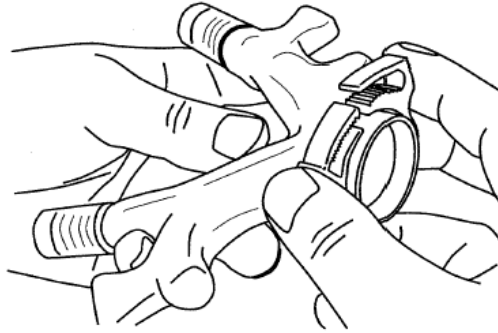


นำตัวยึดมาสวมเข้ากับส่วนบนของท่อทางเดินหายใจ

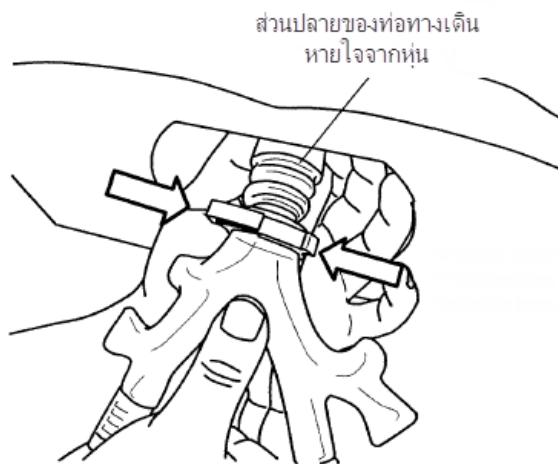

ประกอบเข้ากับส่วนปลายของท่อทางเดินหายใจจากส่วนหัวและใช้นิ้วบีบตัวยึดให้แน่น


2. ทาสารหล่อลื่นลงบนบริเวณภายในช่องจมูกและช่องปาก

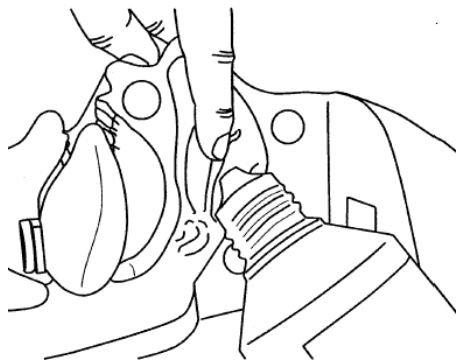




หยดสารหล่อลื่นลงประมาณ 3-4 หยด แล้วใช้ปลายนิ้วค่อยๆทาให้ทั่ว

3. ใส่เสมหะจำลองลงในช่องจมูก ช่องปาก และหลอดลม ตามตำแหน่งที่ต้องการทำการฝึกดูดเสมหะ

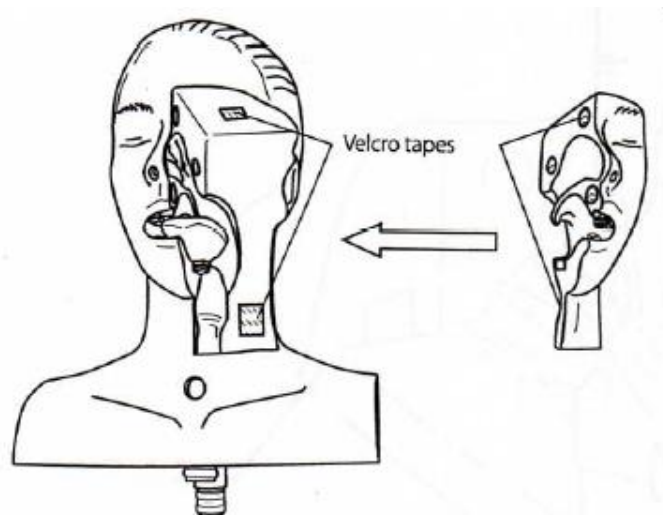


นำชิ้นส่วนหน้าอีกด้านหนึ่งมาประกอบให้สมบูรณ์ โดยตำแหน่งเทป velcro จะประกบกันพอดี

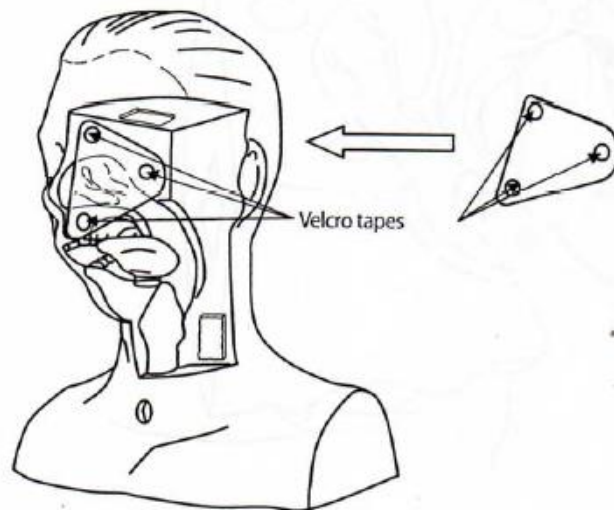

ภายในหน้าของหุ่นจะมีแผ่น acrylic ใสยึดติดอยู่ด้วย velcro สามารถแกะออกได้ ใช้สำหรับการดูตำแหน่งท่อ suction ภายในช่องจมูก

- แผ่น acrylic ใสจะมีแผ่น velcro อยู่เพียงด้านเดียวเท่านั้น หากวางตำแหน่งไม่ถูกต้องหรือผิวด้านจะไม่สามารถยึดติดเข้ากับหุ่นได้
- ห้ามใช้ท่อ suction ที่มีขนาดเกิน 12Fr เด็ดขาด

4. ติดตั้งชิ้นส่วน tracheostomy tube สำหรับการฝึกดูดเสมหะบริเวณตำแหน่งท่อหลอดลม

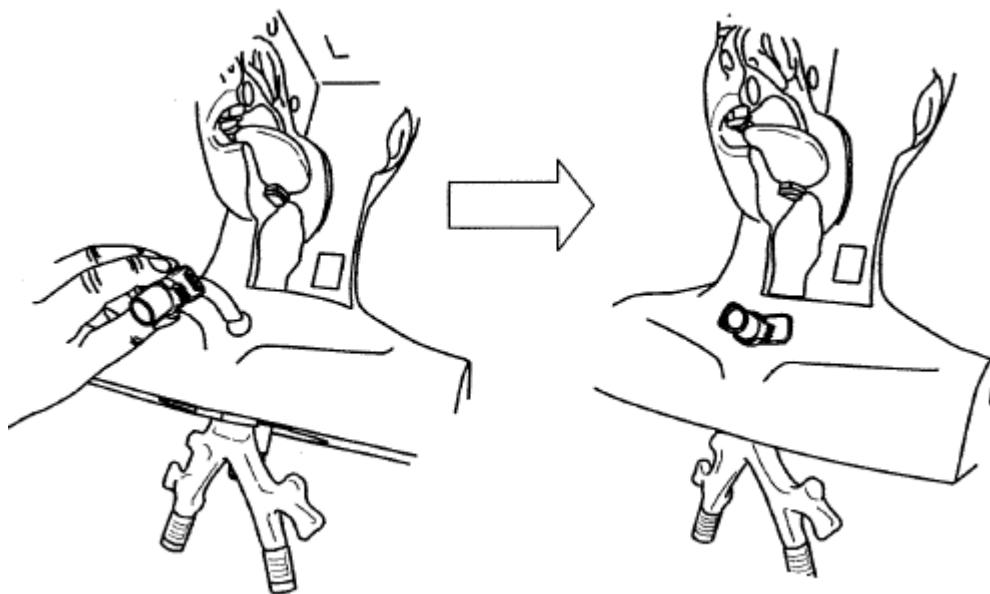

5. ประกอบเข้ากับลำตัว



หุ่นมีชิ้นส่วนลำตัวและฐานสามารถประกอบเข้ากับส่วนหัวได้ ประกอบหลอดอาหารเข้ากับท่อจากส่วนฐานแล้วจึงนำชิ้นส่วนลำตัวมาขีดยึดติดเข้ากับฐานและหัวโดยสายรัดบริเวณหัวไหล่

6. เมื่อประกอบหุ่นเสร็จสิ้นอย่างถูกต้อง สามารถทำการฝึก Tube Feeding และฟังเสียงทางหน้าท้องได้ (ดังรูป)



การดูแลรักษาหุ่น

- ถอดชิ้นส่วนท่อหลอดลมออกจากหุ่น ดังรูป
- ถอดฝาครอบส่วนปลายของท่อหลอดลมทั้งสองออกแล้วใช้น้ำทำความสะอาดภายใน
- หากมีคราบเสมหะหลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะบริเวณ ช่องปาก ช่องจมูก ให้ใช้ผ้า gauze ชุบน้ำเช็ดทำความสะอาด