


คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา


ชื่อรุ่น : P003 รุ่นสาธิตการฝึกใส่สายสวนทางหลอดเลือดสายสะดือทารก

วิธีการใช้

1. นำสายสะดือใส่ช่องบริเวณสะดือของหุ่น จัดวางสายสะดือให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
2. เชื่อมต่อสายสะดือ(ออกด้านหลังตัวหุ่น) เข้ากับกล่องน้ำ โดยสามารถเลือกได้ทั้งหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง
3. เติมน้ำในกล่องบรรจุน้ำจนน้ำไหลออกทางสายสะดือ จากนั้นปรับระดับน้ำโดยเลื่อนความสูง-ต่ำ ของกล่องน้ำ จนได้ระดับน้ำในหลอดเลือดสายสะดือที่ต้องการ (ลองวัดจากสะดือด้านนอกตัวหุ่น)
4. เริ่มต้นใช้งาน
5. หลังการใช้งานทุกครั้งให้ระบายน้ำออกจากตัวหุ่นและถอดสายสะดือออกจากตัวหุ่น

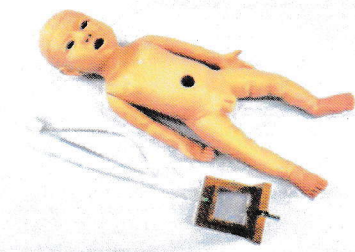

รูปที่ 1

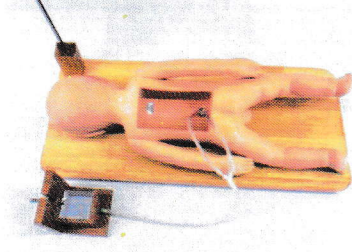

รูปที่ 2



รูปที่ 3

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฝนิ้กให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้



[หลอดเลือดดำและแดง]