

## คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อหุ่น : P037 หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหารทางจมูกทารก


### วิธีการใช้

#### การใส่และการถอด NG Tube

1. จัดวางหุ่นให้อยู่ในท่าที่เหมาะสมกับการฝึก
2. เปิดหน้าท้องของหุ่น จัดวางให้ปอดและกระเพาะอาหารให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
3. ปิดหน้าท้องของหุ่นให้สนิท
4. ก่อนการใช้งานควรทาสารหล่อลื่นให้กับหุ่นบริเวณโพรงจมูก และหลอดอาหารส่วนต้น
5. เริ่มต้นการฝึกหัดถถการ
6. หลังการใช้งานทุกครั้งให้กำจัดน้ำและคราบของสารหล่อลื่นออกทุกครั้ง

#### การทำ Gastric Lavage

1. ถอดกระเพาะอาหารออกจากตัวหุ่น และติดตั้งกระเพาะอาหารแบบใส่เข้ากับตัวหุ่น
2. ปิดแผ่นหน้าอก จัดวางหุ่นในท่าที่เหมาะสมกับการฝึก
3. เริ่มต้นการใช้งาน

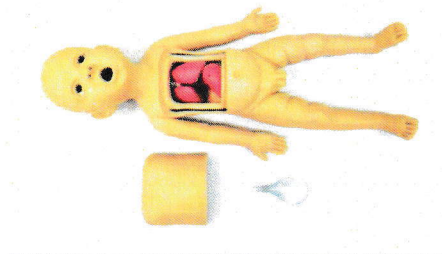

รูปที่ 1



รูปที่ 2

### การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
  - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
2. หลังการใช้งาน
  - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
  - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
  - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฝักให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
  - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
  - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
  - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
  - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้