

คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อรุ่น : OT003 รุ่นสาธิตการฝึกฉีดยาข้อมือ

วิธีการใช้

1. นำหุ่นวางบนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการฝึก ในตำแหน่งคว่ำหรือหงาย
2. นำช่องแขนมาสวมลงบนตัวหุ่นข้อมือ โดยรัดซิปปิดให้สนิท
3. เริ่มต้นการใช้งาน



รูปที่ 1



รูปที่ 2

การดูแลรักษา

1. ก่อนการใช้งาน
 - 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
2. หลังการใช้งาน
 - 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
 - 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
 - 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น (เฉพาะบริเวณที่เป็นยาง)
 - 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฉนวนให้แน่น
3. ข้อควรระวัง
 - 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
 - 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
 - 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
 - 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหลนจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้