

BM SIMULATOR

คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อรุ่น : E009 รุ่นฝึกการตรวจหู


วิธีการใช้

การเชื่อมต่อกับ Computer Notebook


1. นำหุ่นวางบนพื้นที่ที่เหมาะสมกับการฝึก
2. เสียบปลั๊กตัวหุ่น และ Computer Notebook
3. เสียบสายสัญญาณ HDMI ระหว่างตัวหุ่น และ Computer Notebook กดปุ่มเปิด (On) ที่อยู่บนศีรษะของตัวหุ่นค้างไว้ ให้แสงจอ LED ในตัวหุ่นจะเปิดขึ้น



4. เปิด Computer Notebook
5. คลิกเลือกโปรแกรมแสดงผลจอภาพ " BMsimulator -Advance External Ear Examination Model " ที่อยู่บน Desktop
6. จะปรากฏ Tab box ขึ้น ให้คลิกอ่านอย่างเดียว

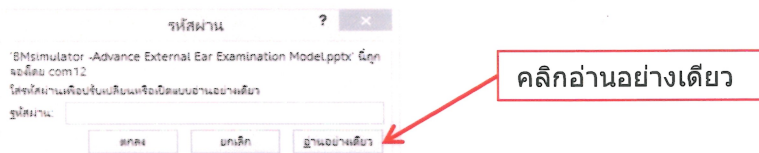

7. กดปุ่มนำเสนอเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน
8. จะปรากฏหน้าจอตามภาพ

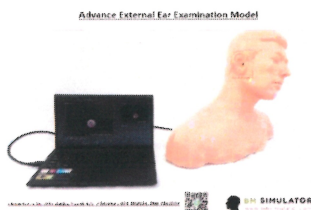

9. คลิกเพื่อเลือก พยาธิสภาพที่ต้องการฝึกดังนี้

- Slide 1 : Normal Tempanic Membrane
- Slide 2 : Chronic Otitis Media
- Slide 3 : Retraction Pocket
- Slide 4 : Cholesteatoma
- Slide 5 : Acute Otitis Media
- Slide 6 : Adhesive Otitis Media
- Slide 7 : Mucooid Otitis Media
- Slide 8 : Serous Otitis Media With Ear Drum Perforation

10. หลังจากใช้งานเสร็จ กดปิด Computer Notebook และ ถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย

คู่มือการใช้งานและการดูแลรักษา

ชื่อหุ่น : E009 หุ่นฝึกการตรวจหู

1. ก่อนการใช้งาน

- 1.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 1.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 1.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น

2. หลังการใช้งาน

- 2.1 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 2.2 เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 2.3 เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าให้แห้งสะอาด
- 2.4 โรย/ทาแป้งฝุ่นให้ทั่วทุกบริเวณของหุ่น
- 2.5 เก็บใส่ภาชนะบรรจุและปิดฝักให้แน่น

3. ข้อควรระวัง

- 3.1 ควรหลีกเลี่ยงวัตถุ สิ่งของที่มีความแหลมหรือคมสัมผัสกับตัวหุ่น เพื่อป้องกันการฉีกขาด
- 3.2 ควรหลีกเลี่ยงการขีดข่วนหรือเปื้อนของหมึกของปากกาชนิดต่างๆ เพราะจะไม่สามารถเช็ดทำความสะอาดได้
- 3.3 ห้ามวางวัตถุอื่นกดทับตัวหุ่น เพื่อป้องกันชำรุดและเสื่อมสภาพ
- 3.4 ควรหลีกเลี่ยงการร่วงหล่นจากที่สูงของหุ่น เพราะอาจทำให้หุ่นชำรุดเสียหายได้
- 3.5 การใช้มือจับแผ่นสไลด์ มือที่จับต้องแห้งสะอาดไม่มีเหงื่อหรือน้ำ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

