



คู่มือการใช้งาน CHOKING MANIKINS

1602 Adult; 1615 Adolescent; 1620 Child; 1640 Infant; 1630 Obese



These manikins are intended to be used as instructional aides in the teaching and demonstration of clearing an obstructed airway caused by a foreign body.

หุ่น Choking (จำลองการฝึกช่วยเหลืออาการสำลัก)



มีหลายหลายขนาดแสดงความแตกต่างในแต่ละช่วงอายุออกแบบมาสำหรับการฝึกการช่วยเหลืออาการสิ่งแปลกปลอมติดขัดในทางเดินหายใจผลิตจากพลาสติกไวนิลที่มีความแข็งแรง มีส่วนของ rib cage , sternum และ xiphoid ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของร่างกายได้ชัดเจนสำหรับการฝึกฝนที่มีความสำคัญในการช่วยชีวิต

หุ่น Choking จะมาพร้อมกัตัวเลือกของสิ่งแปลกปลอม ที่จะเข้าไปติดที่ทางเดินหายใจ คือ ลูกบอลกลมและท่อนซิลิโคน ซึ่งเป็นการจำลองชิ้นของเนื้อ ยกเว้นหุ่นเด็กทารกเบอร์ 1640 ที่จะมากับลูกบอลกลมอย่างเดียว



การติดตั้งหุ่น

- นำลูกบอลกลม (วัสดุจำลองชิ้นเนื้อ) ที่คล้องอยู่กับเชือก นำมาคล้องคอหุ่น Choking
- นำท่อนซิลิโคนที่คล้องอยู่กับเชือกอีกอันหนึ่งแยกออกมาเพื่อป้องกันการพันกันของเชือกขณะใช้งาน

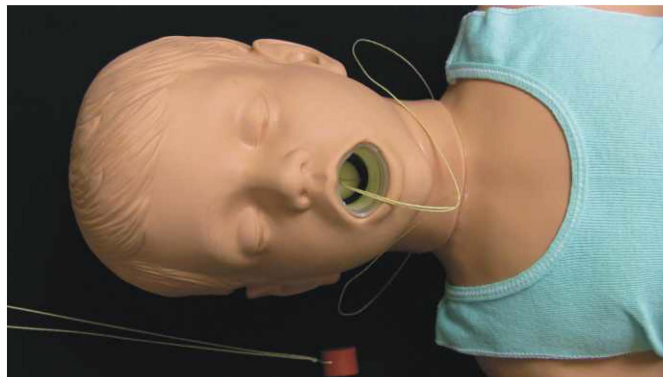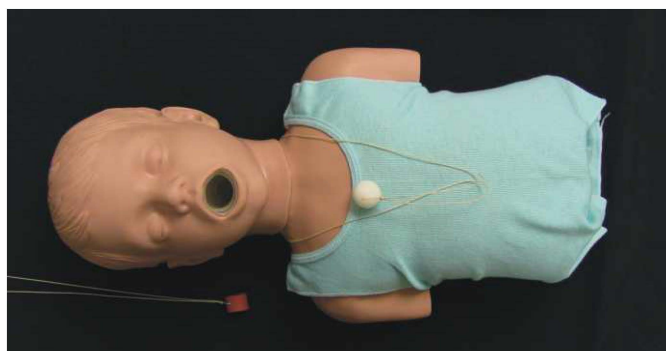

- ใส่ลูกบอลกลม เข้าไปในปากของหุ่น
- ดันลูกบอลกลมด้วยนิ้วอย่างนุ่มนวลเข้าไปด้านในของระบบทางเดินหายใจ จนถึงส่วนลึกสุด)

การทำงานของหุ่น

หุ่น Choking ควรนำมาใช้สำหรับฝึกการแก้ไขอาการ ที่มีสิ่งแปลกปลอมติดขัดในทางเดินหายใจเท่านั้น เป็นวิธีการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่ติดอยู่ในทางเดินหายใจออกอย่างถูกวิธี จากการกระแทกโดยการทำให้วัตถุ ที่อยู่ส่วนลึกของทางเดินหายใจนั้นกระเด็นออกมาซึ่งเป็นไปได้ที่จะทำจากการหมุนตัวหุ่นหันหน้าลงต่ำ และเพิ่มการกระแทกให้สิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดออกมาทางปาก

การบำรุงและรักษา

คำเตือน: ห้ามใช้หุ่น Choking ในการฝึก CPR เพราะอาจเกิดการปนเปื้อนจากหุ่นได้ และจะทำให้หุ่นมีความเสียหายทั้งภายนอกและภายใน

Note: ห้ามทำให้ภายในหุ่นเปียกน้ำ จากการเทน้ำเข้าทางปาก เพราะจะทำให้หุ่นเกิดความเสียหายการทำความสะอาดให้ใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดหมาดๆ เช็ดที่ตัวหุ่น หากพบคราบสกปรกที่ตัวหุ่นให้ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ เช็ดทำความสะอาด และใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งทุกครั้งก่อนบรรจุลงกล่อง

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้กระดาษที่มีสีหรือมีหมึกห่อหุ้มตัวหุ่น เพราะกระดาษสีหรือหมึกจากกระดาษจะปนเปื้อนหุ่นได้ ควรใช้เป็นกระดาษไขห่อหุ้มตัวหุ่นแทน



Manufacturers of Training Manikins, Casualty Simulation Kits & Medical Training Devices

PO Box 1289 • 16 Simulaids Drive • Saugerties, NY 12477
(845) 679-2475 • 1-800-431-4310 • FAX: (845) 679-8996
www.simulaids.com