



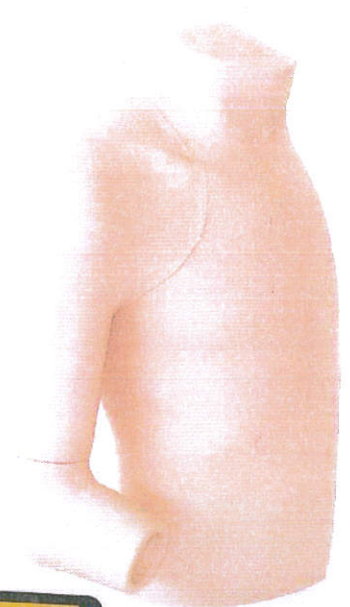

คู่มือการใช้งาน

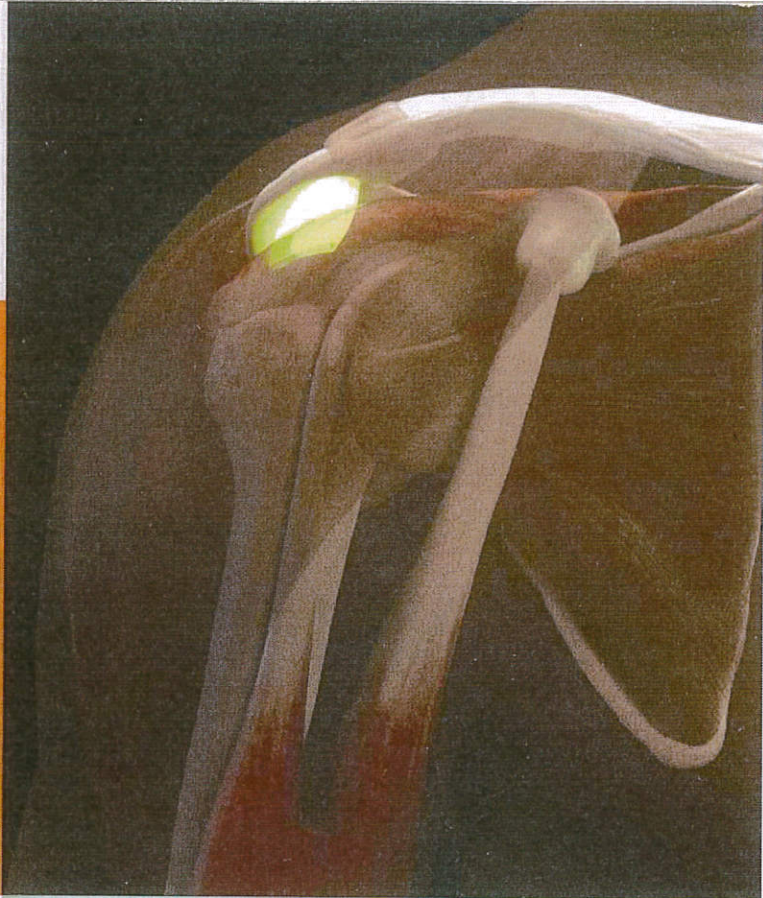

# SHOULDER INJECTION TRAINER PALPATION GUIDED

This product is available in light & dark skin tones

- |       |       |
|-------|-------|
| 70200 | 70219 |
| 70201 | 70220 |

FOR MORE SKILLS TRAINING PRODUCTS VISIT

[limbsandthings.com](http://limbsandthings.com)

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | [sales@limbsandthings.com](mailto:sales@limbsandthings.com) | +44 (0) 117 311 0500

|  |    |
|--|----|
| PACKAGE ที่ใหม่                                | 3  |
| ใบรับรองการทดสอบ                               | 4  |
| <b>คำแนะนำด้านความปลอดภัยและการทำความสะอาด</b> | 6  |
| <b>เริ่มต้นการใช้งาน</b>                       | 7  |
| • ใส่แบตเตอรี่                                 | 7  |
| • การเชื่อมต่อที่บัส                           | 8  |
| • การปฏิบัติ                                   | 10 |
| <b>คุณสมบัติอื่นๆ ของแอป</b>                   | 11 |
| <b>การดูแลและบำรุงรักษา</b>                    | 12 |
| • ถอดและติดตั้งใหม่                            | 12 |
| • การเปลี่ยนผิวหนัง                            | 13 |
| • การเปลี่ยนแบตเตอรี่                          | 14 |

TAKE A LOOK  
AT OUR **VIDEO**



VISIT THE WEBSITE  
**limbsandthings.com**  
OR YOUTUBE CHANNEL  
**youtube.com/limbsandthings**

PACKAGE ที่ใหม่

Shoulder Torso

70215  
70226




Shoulder Module

70212  
70223




Shoulder Skin (x1 Spare)

70210  
70222

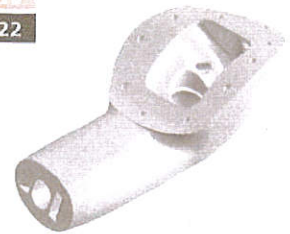


Needle Set

70108

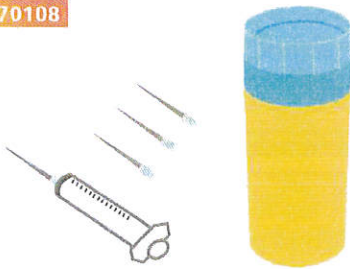


Android Tablet  
(Only Included with 70200/70219)

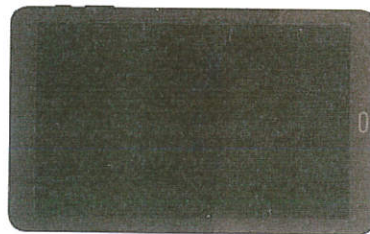

Elbow



AA Batteries (x2)

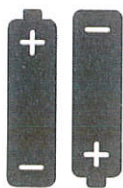

Carry Case



คำแนะนำด้าน  
ความปลอดภัย  
และการทำความสะอาด

อ่านคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยอย่างละเอียด  
ก่อนใช้เทรนเนอร์ฝึกไหล่ของคุณ

ทำ



ปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด  
รักษาคำแนะนำเหล่านี้  
พึงคำเตือนทั้งหมด

ใช้เข็มที่ใหม่หรือใกล้  
กับเข็มใหม่ขนาด 21 เกจ  
แพ็คเกจประกอบด้วยเข็ม



หากสินค้าเสียหายหรือชำรุด ควรส่งซ่อม โดย  
Limbs & Things หากต้องการจัดการเรื่องนี้  
โปรดติดต่อจุดซื้อของคุณซึ่งจะสามารถให้  
ใบเสนอราคาการซ่อมแซมได้

ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าชุบน้ำ  
หมาดๆ หรือผ้าชุบน้ำหมาดๆ โดยใช้ผ้าอุ่น  
ผสมผงซักฟอกอ่อนๆ เท่านั้น



ห้ามทำ



ห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อนอย่าให้  
ผลิตภัณฑ์โดนเปลวไฟหรือใช้ใกล้  
แหล่งกำเนิดเปลวไฟห้ามใช้ตัวทำละลาย  
ไวไฟใกล้หรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้

ข้อควรระวัง - อาจเกิดการระเบิดได้หากแบตเตอรี่หมด  
แทนที่ด้วยประเภทที่ไม่ถูกต้อง ผลิตภัณฑ์นี้  
มีไว้สำหรับใช้กับรุ่นมาตรฐาน AA Alkaline  
หรือที่คล้ายกันซึ่งไม่สามารถชาร์จใหม่ได้  
แบตเตอรี่ ตรวจสอบแนวทางท้องถิ่นสำหรับ  
การทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี



ห้ามฉีดไหลด้วยของเหลวหรือใช้ใกล้กับน้ำ  
ผลิตภัณฑ์นี้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์


อย่าหมุน/ขยับไหล่มากเกินไป  
เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้



การจัดเก็บและการขนส่ง



ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการบรรจุและ  
รักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสมระหว่างการขนส่งและ  
การจัดเก็บ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อ  
ผลิตภัณฑ์

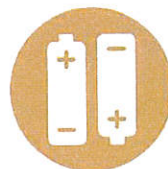


ถอดแบตเตอรี่ออกหากต้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์เป็น  
เวลานาน


เริ่มต้นการใช้งาน

การใส่แบตเตอรี่

ถอดไหล่ออกจากลำตัว

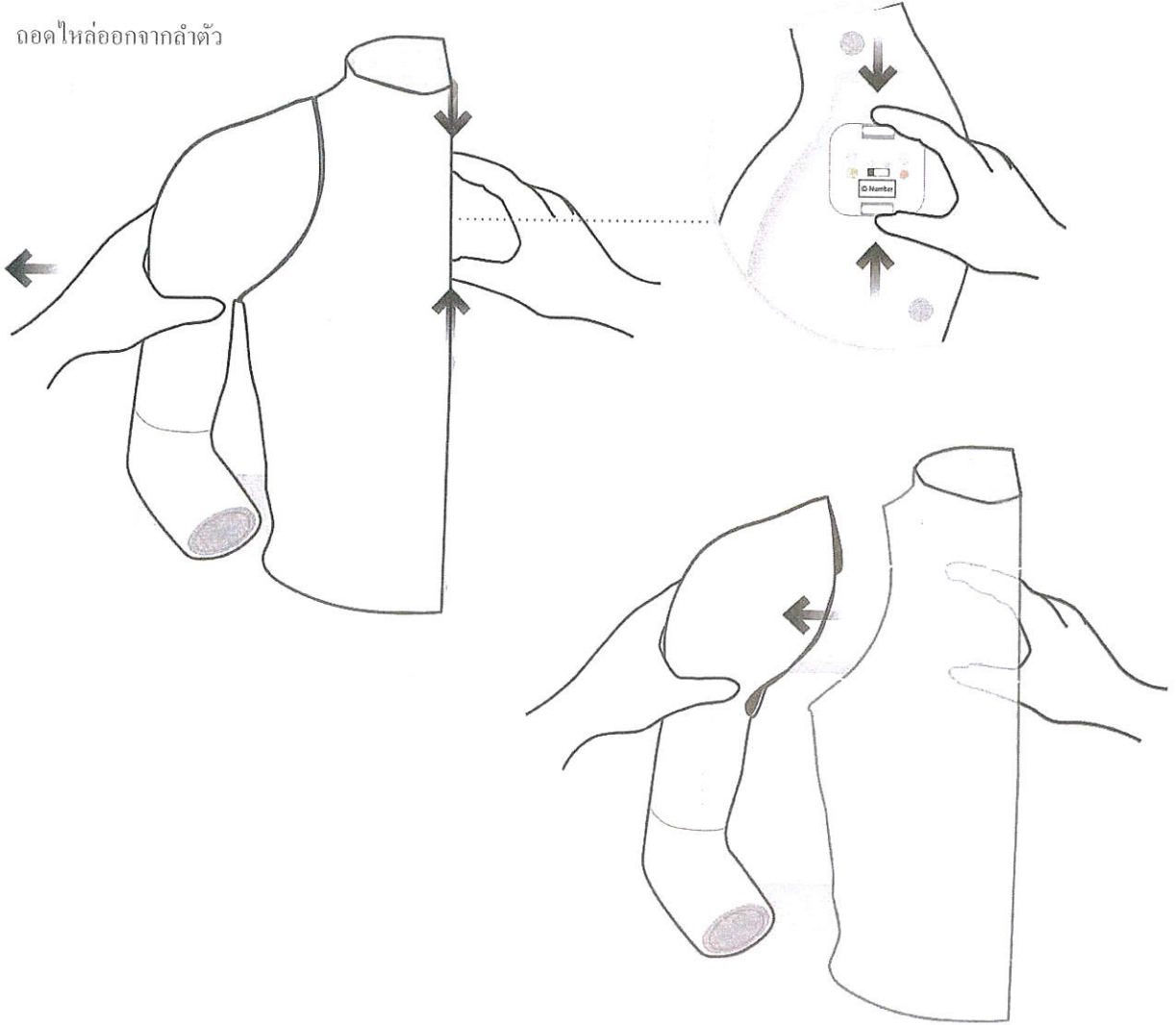


ใส่แบตเตอรี่และติดตั้งไหล่กลับเข้าไปใหม่

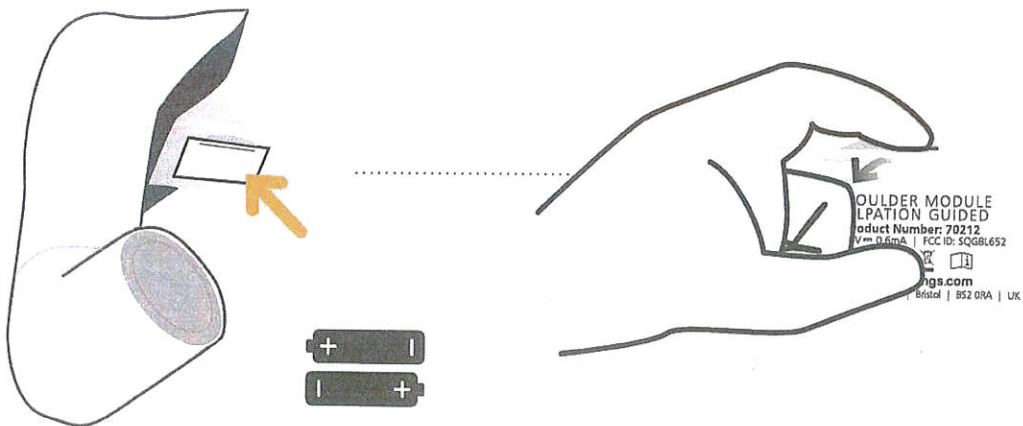

เริ่มต้นการใช้งาน

การเชื่อมต่อกับแท็บเล็ต

1 เปิดสวิตช์ที่หัวไหล่

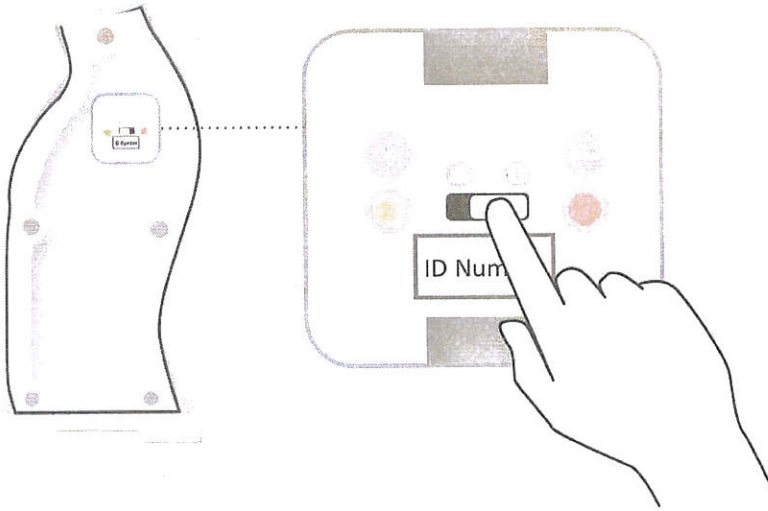

2 เปิดแอปพลิเคชัน Shoulder Injection App สามารถดาวน์โหลดได้ที่ฟรีที่เว็บไซต์ Limbs&Things




ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธที่อุปกรณ์ของคุณพร้อมใช้งาน

ไฟของบลูทูธ



ปุ่มหัวไหล่เปิด - ไม่มีไฟแสดง

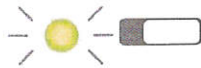


ปุ่มหัวไหล่เปิด - ไฟจะกระพริบอย่างรวดเร็วพร้อมเชื่อมต่อ




ปุ่มหัวไหล่เปิด - ไฟจะกระพริบช้าๆเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว


3 เลือกภาษา

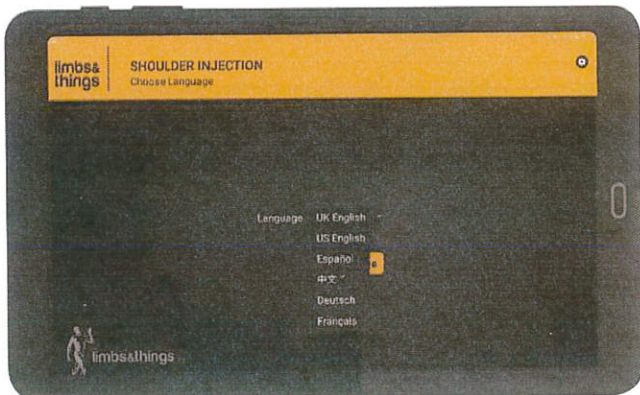


4 ส่งรายละเอียดการลงทะเบียน

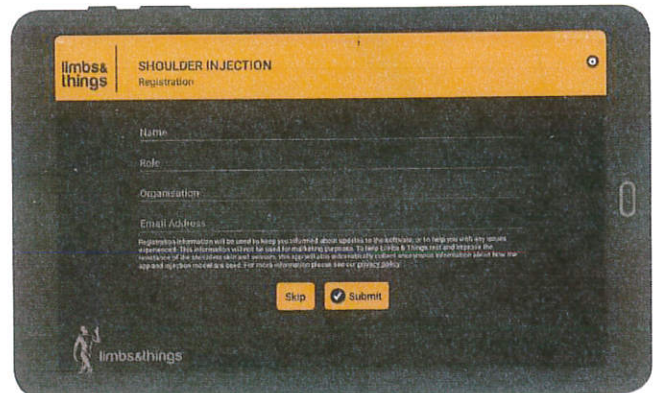



5 เลือก 'PALPATION GUIDED'

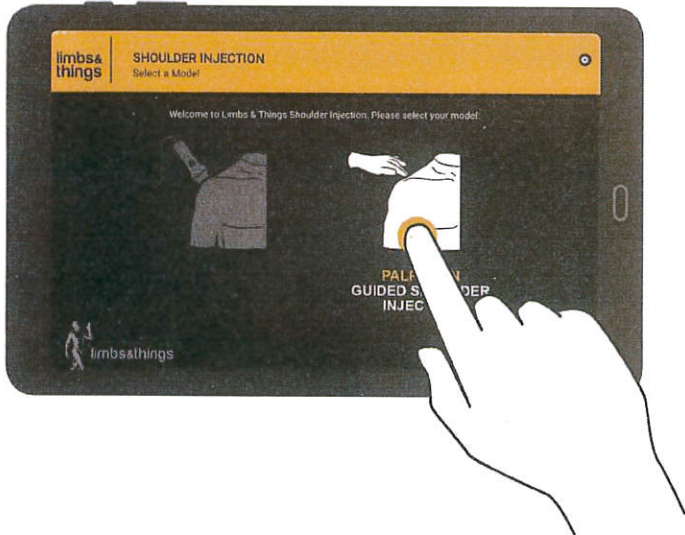


6 เลือก 'CONNECT MODEL'

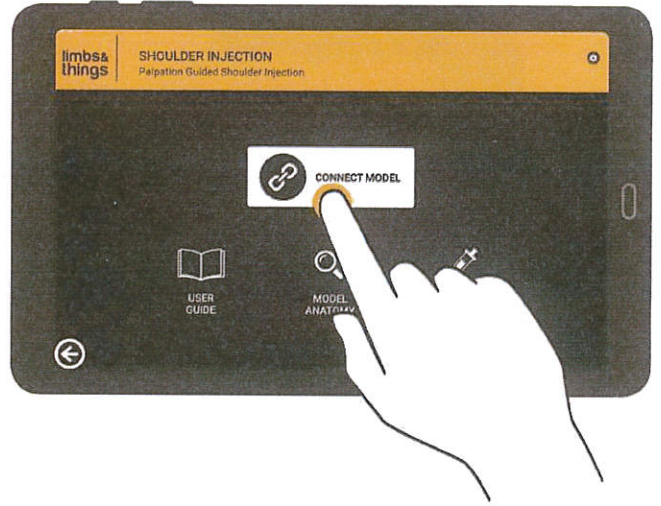

7 เลือกตัวเลขให้ตรงกับตัวเลขบนไหล่ของหุ่นจำลอง และเลือก 'CONNECT'

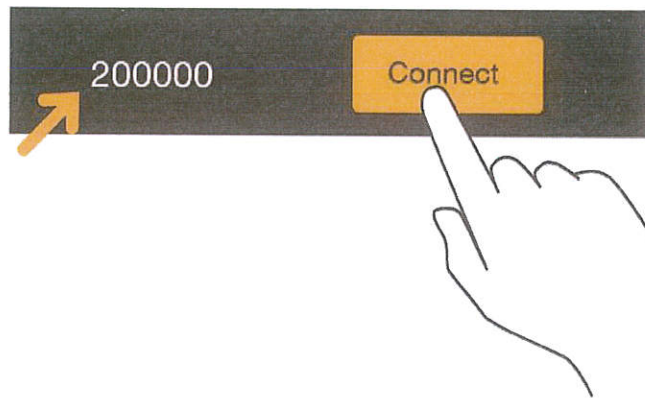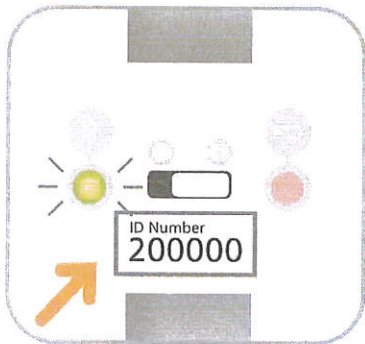

8 เลือก 'PRACTICE MODE'

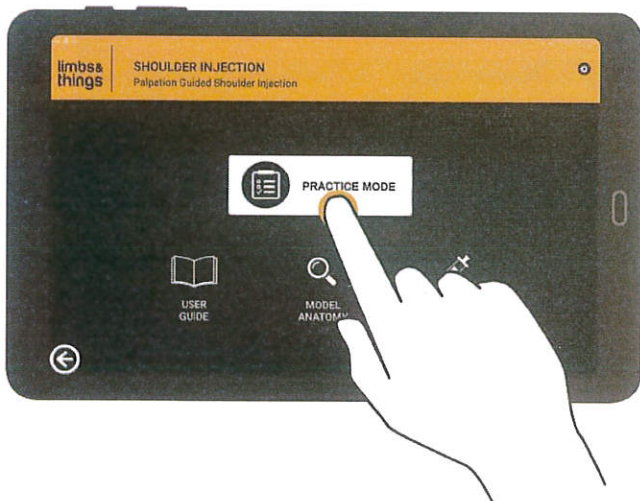


คุณสามารถเริ่มการฝึกซ้อมได้ทันที


การปฏิบัติ




การฉีดที่หัวไหล่  
ถ้าคุณทำอย่างถูกต้อง ไฟที่แอปพลิเคชันจะสว่าง  
และมีเสียงบี๊บ

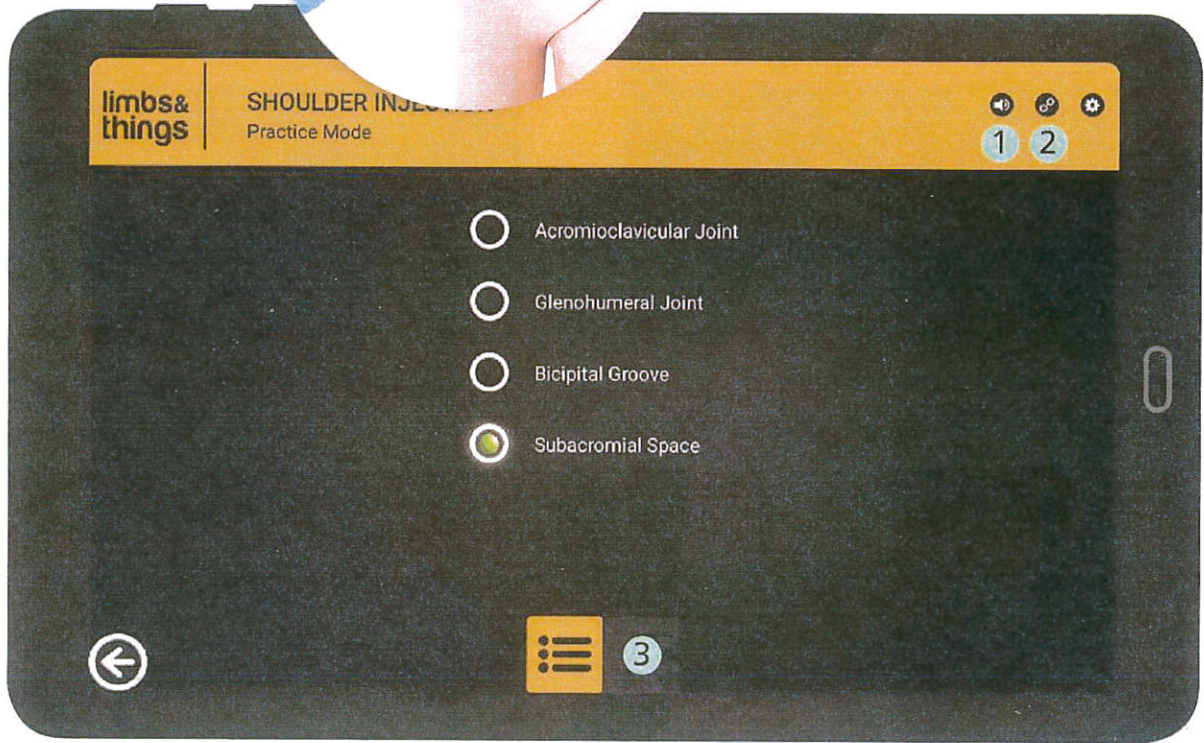



1 เปิด/ปิด เสียงตอบรับ

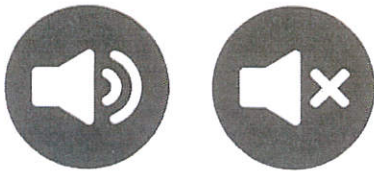


2 เชื่อมต่อ/ขาดการเชื่อมต่อกับหุ่นฝึก

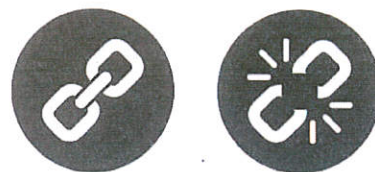


3 ลิสต์มุมมองอนาโตมี 360 องศา

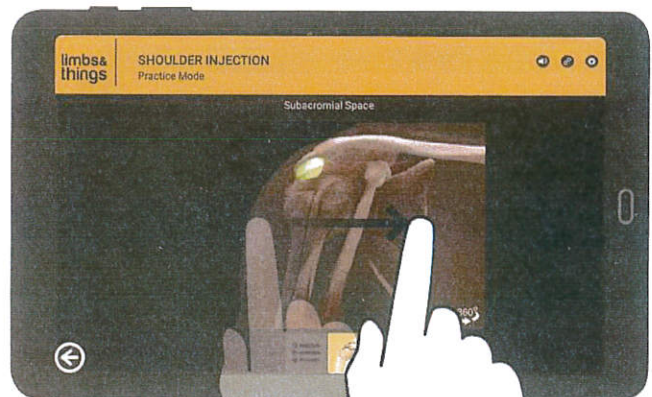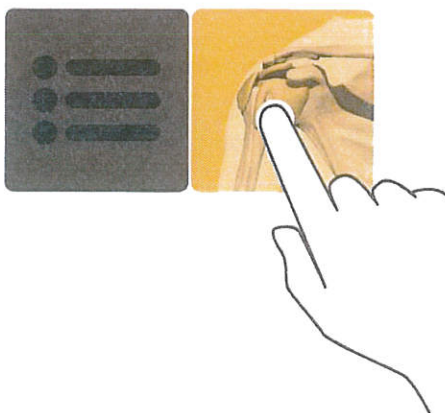


คุณสมบัติอื่นๆ ของแอป

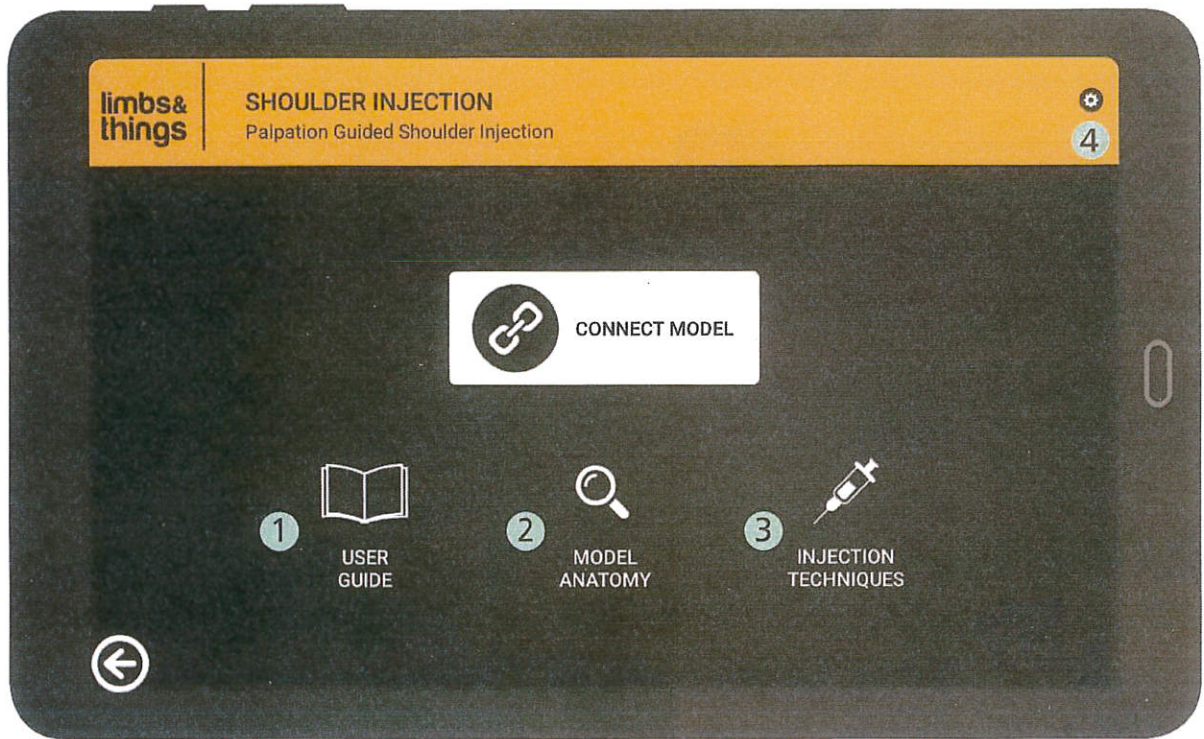


1 คู่มือสำหรับผู้ใช้

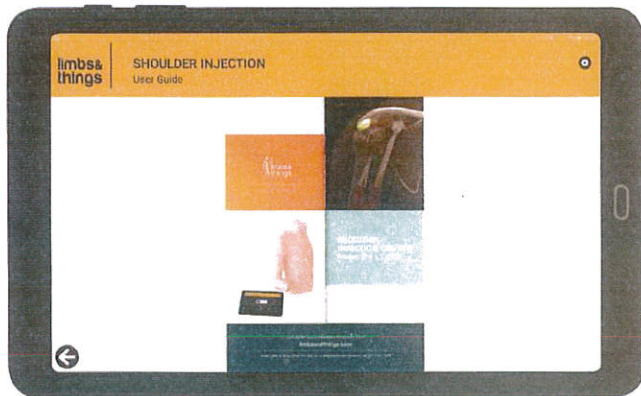


2 โมเดลอนาโตมี

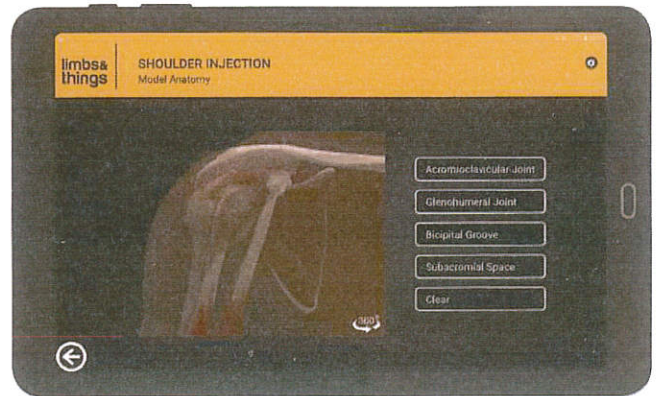

3 วิธีการกรีดดยา

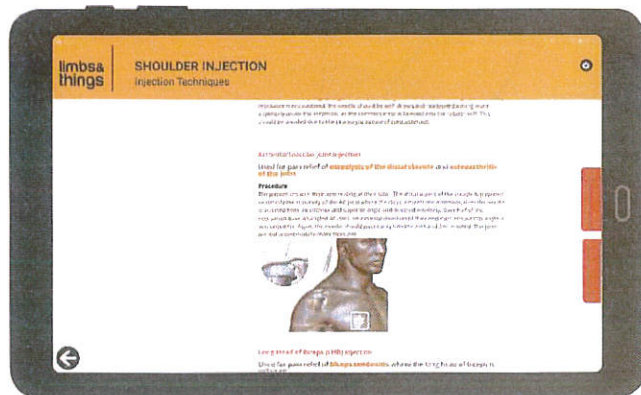


4 การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

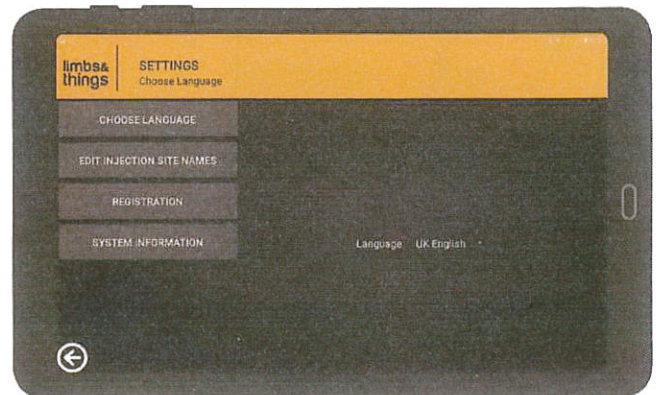


การดูแล และการรักษา

การถอด และใส่กลับใหม่ของหัวไหล่

1 ถอดหัวไหล่ออกจาก torso

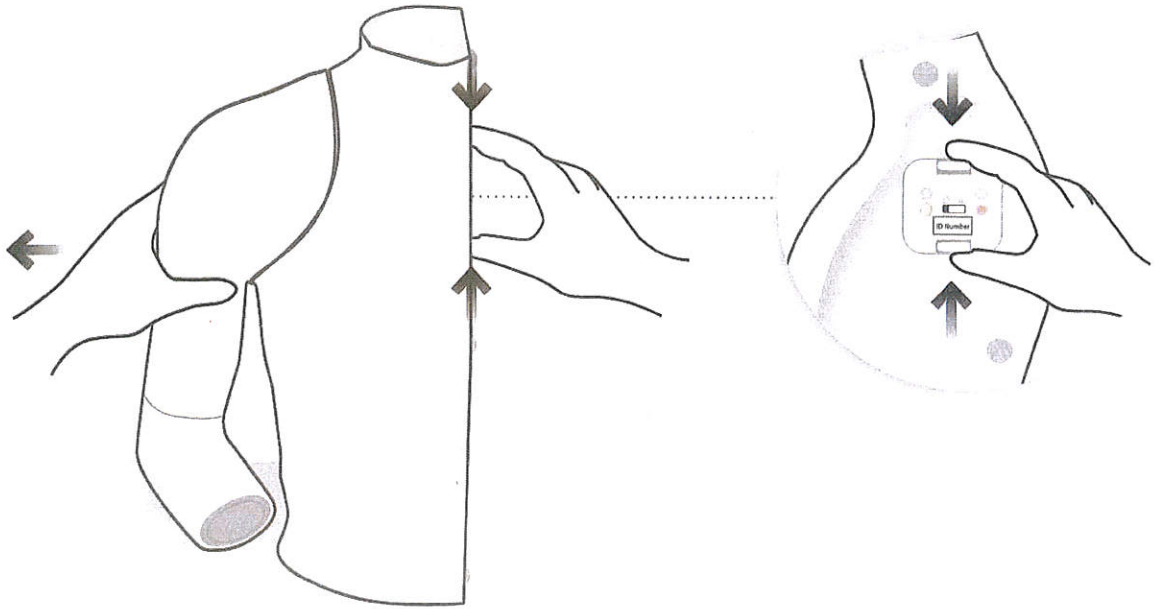



2 ติดหัวไหล่กลับไป torso

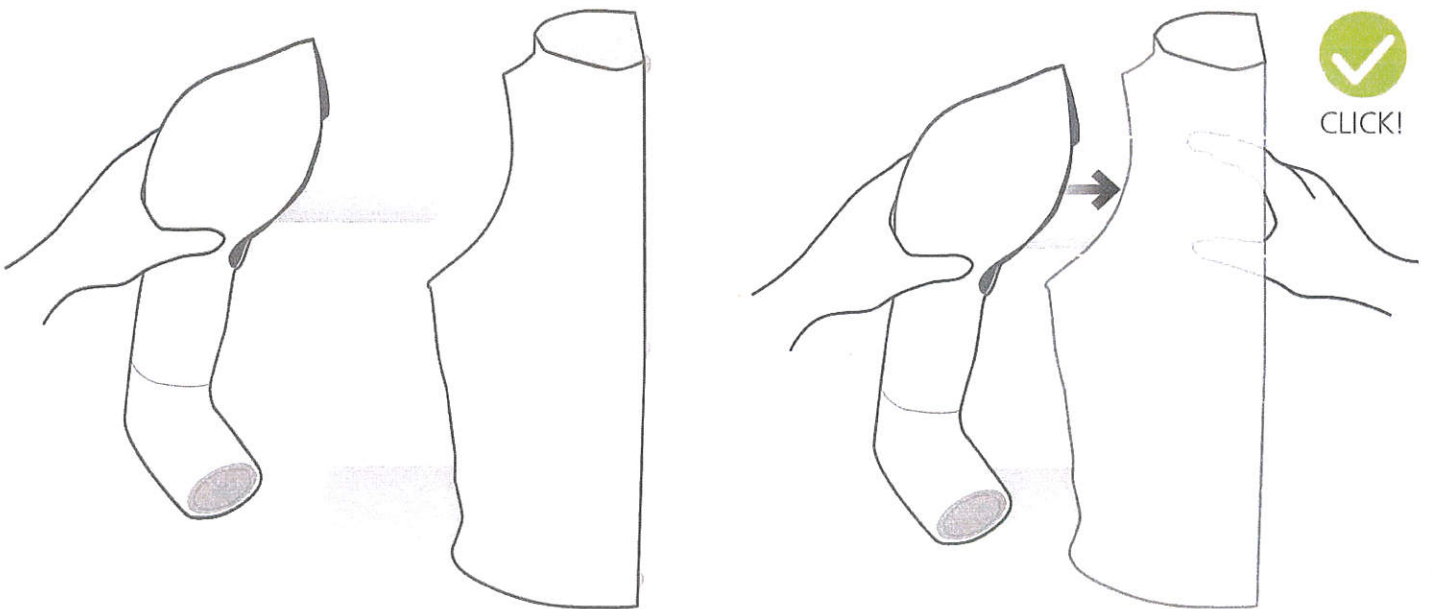

# การเปลี่ยนผิวนั่ง


1

ถอดข้อศอกจำลองออก

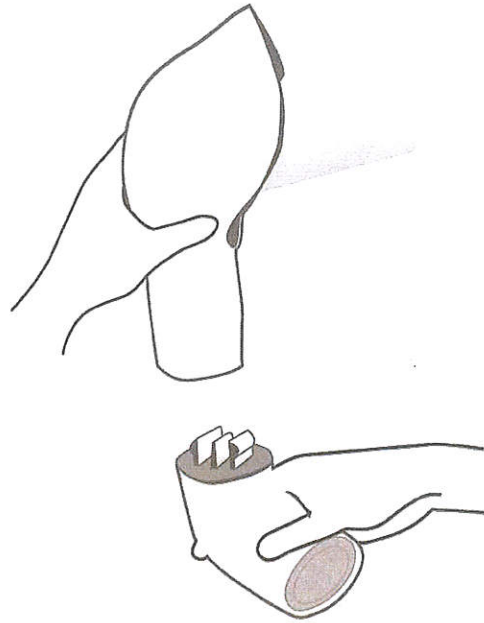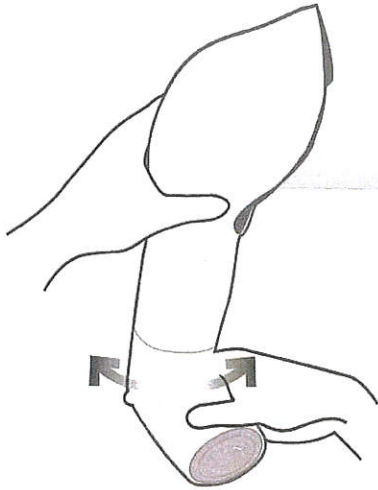

2

ลอกหนัง เริ่มจากทางด้านบน

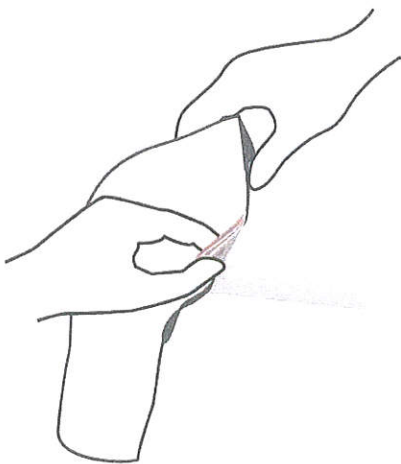


3

ดันกระดูกต้นแขนขึ้น

4


ดึงกระดูกต้นแขนออก

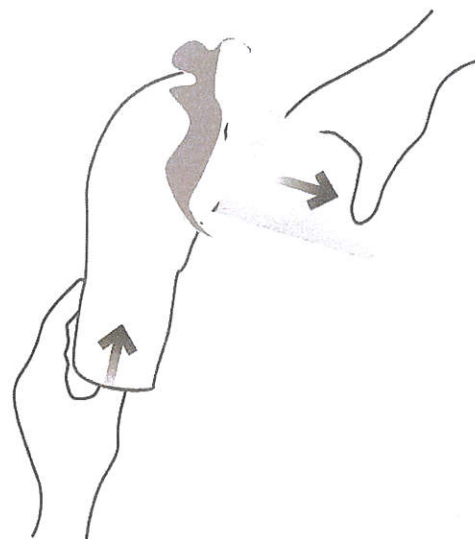

**T** เช็คให้แน่ใจว่าคุณดึงกระดูกต้นแขนเข้าไปใน  
ผิวนั่ง โดยร่องทั้งสองข้างหันไปด้านหน้า

# การเปลี่ยนแบตเตอรี่

↑ มีการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ขึ้น

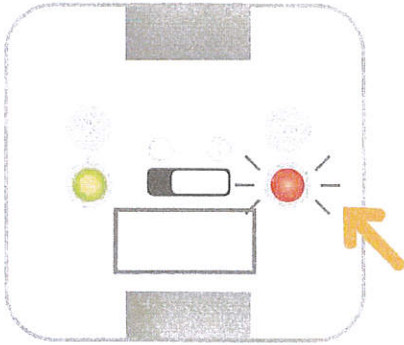


**T** ไฟแจ้งเตือนแบตเตอรี่สีแดง



แบตเตอรี่ปกติ - ไม่มีไฟ






แบตเตอรี่ต่ำ - ไฟกระพริบช้าๆ

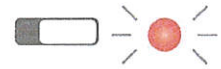

แบตเตอรี่หมด - ไฟจะกระพริบอย่างรวดเร็ว  
และปุ่มฝึกซ้อมจะดับ

2

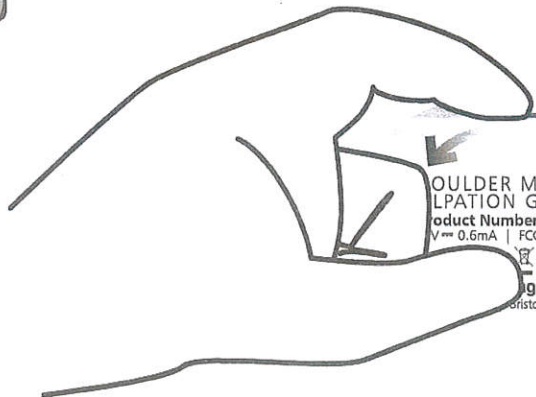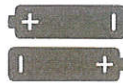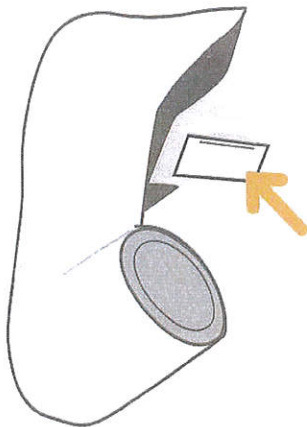

SHOULDER MODULE  
OPERATION GUIDED  
Product Number: 70212  
V = 0.6mA | FCC ID: SQGBL652  
www.ags.com  
Bristol | BS2 0RA | UK