
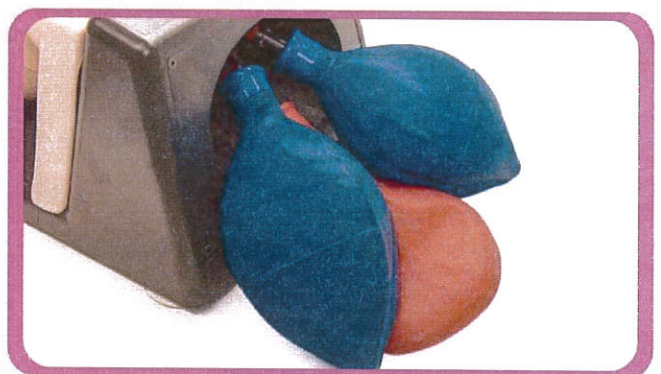


คู่มือการใช้งาน
Airsim Child X
หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต

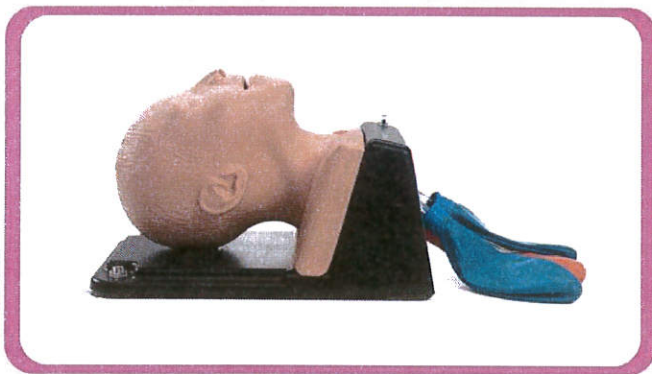

ขอขอบคุณที่ซื้อสินค้าของเรา Airsim Child X หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต ด้วยการออกแบบของเราหุ่นจำลองชิ้นนี้จะทำให้ท่านได้ฝึกจำลองอย่างเสมือนจริง

หุ่นจำลองนี้แสดงลักษณะของเด็กโต (อายุ 6 ปี) มีจุดสังเกตทางกายวิภาคทั้งภายนอก และภายในอย่างหมดลม ช่องกระเพาะอาหาร

หุ่นจำลองสามารถฝึกการจำลองใส่ท่อช่วยหายใจได้ทั้งทางจมูกและทางปาก สามารถจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเข้าไปในกระเพาะได้ในกรณีที่ใส่ท่อผิด

ทางเรามีการรับประกันให้หากหุ่นจำลองหรือสินค้าชำรุด ผิดพลาด อันเนื่องมาจากบริษัท โปรดเก็บใบรายการสั่งซื้อหรือใบเสร็จไว้เพื่อยืนยันในการคืนสินค้า

สารบัญ

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์	2
อุปกรณ์ประกอบ	2
ขนาดอุปกรณ์ที่แนะนำ	2
ข้อมูลการตั้งค่าเบื้องต้น	3
การใช้งาน AirSim Child X	3
การดูแลและบำรุงรักษา	3

ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเลขสินค้า : AC10006X

น้ำหนักสินค้าโดยประมาณ : Approx. 2kg

ขนาดสินค้าโดยประมาณ : 41 x 26 x 23cm

อุปกรณ์ประกอบ

- 1 AirSim Child X หุ่นจำลองการใส่ท่อช่วยหายใจเด็กโต (AC10006X)
- 1 AirSim Child X กระเป๋ายารรจุ (CBAG03)
- สารหล่อลื่น 100ml (TL001)
- แผ่นกาว 2 ชุด (ใช้เพื่อติดฐานหุ่นเข้ากับพื้นผิวเพื่อความมั่นคงขณะใช้ *หากจำเป็น)

ขนาดอุปกรณ์ที่แนะนำ

- 4.5-5.0 mm สำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูก
- 5.5-6.0 mm สำหรับการใส่ท่อช่วยหายใจทางปาก
- เบลดเปิดทางเดินหายใจขนาดเบอร์ 2
- หน้ากาก LMA ขนาดเบอร์ 2
- อุปกรณ์อื่นๆควรมีขนาดไม่ต่างกันมาก

ข้อมูลการตั้งค่าเบื้องต้น

- ค่อยๆ นำหุ่นจำลองออกจากกล่องบรรจุ
- วางหุ่นบนพื้นผิวที่เหมาะสมโดยพื้นผิวจะต้องไม่มีรูพรุนเพื่อให้แรงดูดที่ฐานกับพื้นเพียงพอ
- ตัวเลือกเสริม: มีแผ่นกาวมาให้พร้อมกับเช็ทหุ่นเพื่อเพิ่มความมั่นคงหากจำเป็น เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่บนพื้นผิวที่เหมาะสมสำหรับให้ฐานดูดมีประสิทธิภาพ เพียงลอกกาวออกแล้วหาที่ๆเหมาะสมแล้วติดเข้ากับฐานของหุ่น
- สามารถวางศีรษะไว้ในตำแหน่งที่เป็นตรงกลางหรือหากมีการทำหัตถการอื่นๆก็สามารถขยับคอของหุ่นหรือขยับฐานได้
- ตรวจสอบปริมาตรอากาศในลิ้นว่าเพียงพอหรือไม่ โดยสามารถเติมลมหรือปล่อยลมออกโดยใช้กระบอกฉีดยาเพื่อปรับความยากในการใส่ท่อช่วยหายใจได้
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีถุงปอดสองใบและถุงกระเพาะหนึ่งใบติดอยู่กับทางเดินหายใจและหลอดอาหารตามลำดับ
- จัดสเปรย์หล่อลื่นจำนวนมากที่มาพร้อมกับหุ่น (TL001) ในทางเดินหายใจและอุปกรณ์ก่อนใช้งาน

การใช้งาน AirSim Child X

- การใส่ท่อช่วยหายใจทางจมูก
- เทคนิคการช่วยหายใจแบบ Bag Valve Mask (BVM)
- อุปกรณ์ supralottic ครบครัน
- การส่องกล้องกล่องเสียงโดยตรงและวิดีโอ
- การใส่ท่อช่วยหายใจ

การดูแลและการบำรุงรักษา

เก็บในที่สะอาดและห่างจากความร้อนและแสงแดดโดยตรงหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะ ตัวทำละลาย น้ำมันหรือจาระบี และผงซักฟอกชนิดเข้มข้น เมื่อไม่ได้ใช้งาน ผลิตภัณฑ์โปรดเก็บในกล่องบรรจุที่ให้มา

ล้างทางเดินหายใจ AirSim X อย่างทั่วถึงด้วยน้ำอุ่น โปรดใช้น้ำสบู่อุ่น ๆ หรือสิ่งที่คล้ายกันจนกว่าสิ่งแปลกปลอมและสารตกค้างที่มองเห็นได้ทั้งหมดจะถูกกำจัดออกไป

ผงซักฟอกสูตรอ่อนหรือการทำความสะอาดด้วยเอนไซม์
อาจใช้สารในทางเดินหายใจตามคำแนะนำของผู้ผลิตและตามการแจ้งจางที่เหมาะสม
ผงซักฟอกต้องไม่มีสารระคายเคืองต่อผิวหนังหรือเยื่อเมือก

โปรดอย่าใช้สิ่งต่อไปนี้เมื่อทำความสะอาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ AirSim

- ยาฆ่าเชื้อโรค สารฆ่าเชื้อ หรือสารเคมี เช่น กลูตาราลดีไฮด์ (เช่น Cidex®)
- เอทิลีนออกไซด์ น้ำยาทำความสะอาดที่มีฟีนอล หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีไอโอดีน

เพื่อตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราขอแนะนำขั้นตอนเพิ่มเติมนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์:

ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ (ขั้นต่ำ 75%) แล้วเช็ดออก ทำซ้ำ 3-4 ครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างสมบูรณ์ วิธีนี้สามารถใช้ได้ทั้งบนผิวหนังซิลิโคนและทางเดินหายใจที่เป็นลาเท็กซ์

ต้องใช้ความระมัดระวังเมื่อถอดตัวเครื่องออกจากพื้นผิวหากติดแผ่นกาวเพื่อความมั่นคง หลีกเลี่ยงการดึงอุปกรณ์ออกจากพื้นผิวด้วยแรงที่มากเนื่องจากจะทำให้เสียหายได้ควรหาแผ่นเหล็กหรือสิ่งที่มีพื้นเรียบเพื่อแซะกาวออกจากฐาน

กรุณาส่งคำถามเกี่ยวกับการรับประกันและการซ่อมแซมทั้งหมดไปที่:



TruCorp Ltd
33 Waringstown Road
Lurgan, Co. Armagh
BT66 7HH, N. Ireland
info@trucorp.com
Tel: +44 (0) 28 3888 2714