



USER GUIDE

คู่มือการใช้งาน

PARACENTESIS TRAINER

This product is available
in light and dark skin tones

60100

60111

FOR MORE SKILLS TRAINING PRODUCTS VISIT

limbsandthings.com

Sussex Street, St Philips, Bristol, BS2 0RA, UK | sales@limbsandthings.com | +44 (0) 117 311 0500

ส่วนประกอบ

Skin **ชิ้นส่วนผิวหนัง**

60101


60112



Pads (x2) **ชิ้นเนื้อสำหรับการฝึก**

60102

60113

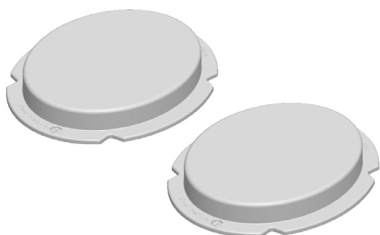


Liver **ชิ้นส่วนตับ**

60103



Spleen **ชิ้นส่วนม้าม**

60104

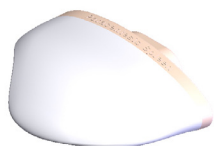


Bowel Insert (x2) **ชิ้นส่วนลำไส้**

60105



Floating Bowel (x2) **ชิ้นส่วนลำไส้**

60106

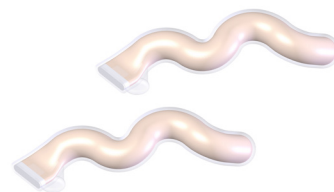

Clamping Frame (x2) **กรอบชิ้นเนื้อ**

60107




Large
Volume Refill
System

60108

ชุดเติมน้ำ



โครงสร้างลำตัว
Base Unit

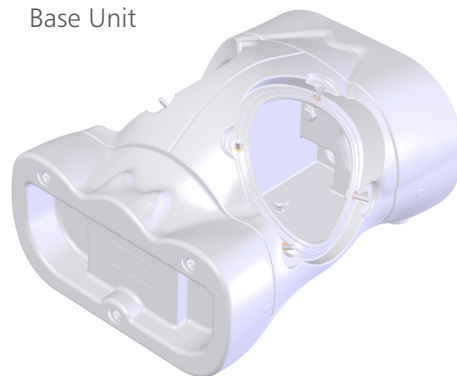

กระเป๋า
Carry
Case



การเริ่มใช้งาน

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
(ไม่ได้มีมากับหุ่นจำลอง)

ภาชนะใส่น้ำ




ถาดรูปไต



กรวย




อุปกรณ์ Rocket Catheter

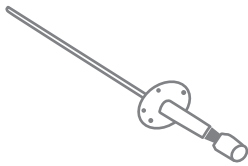

เข็มฉีดยาขนาด 21g



มีดผ่าตัด

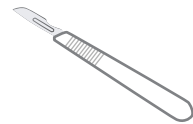

หัว probe Ultrasound
แบบ Large Curvilinear



เจล สำหรับ
ultrasound



ชิ้นส่วนลำไส้


60105




60106




1

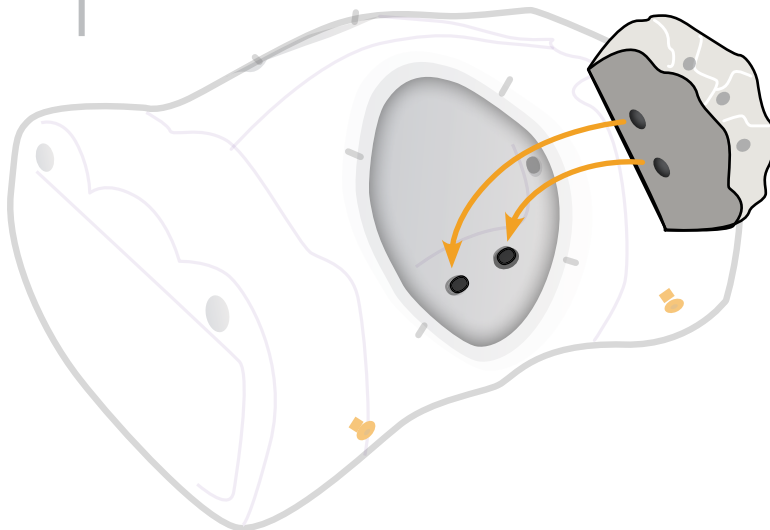

2

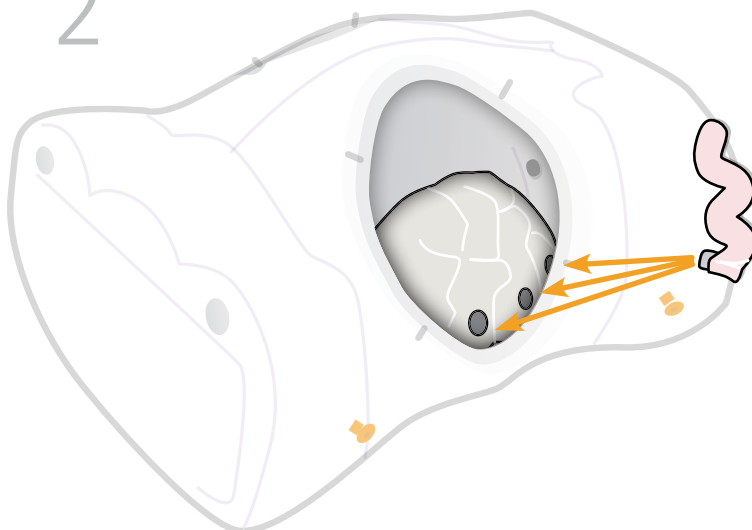

3

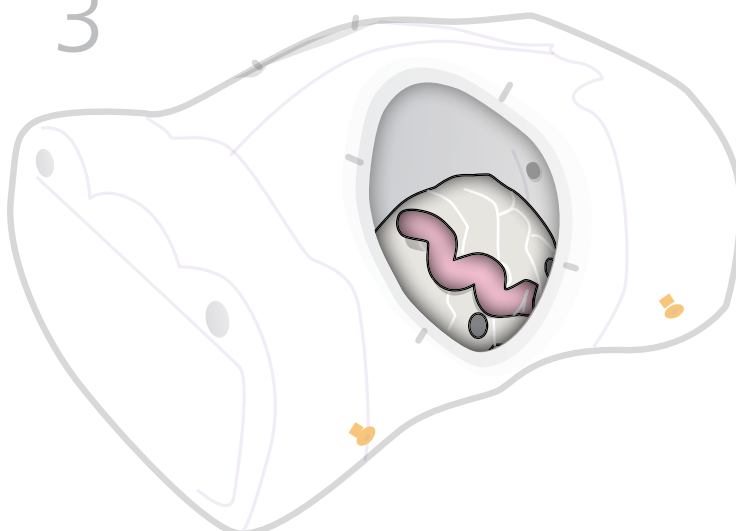


ชั้นส่วนตับ

60103



ข้างขวา

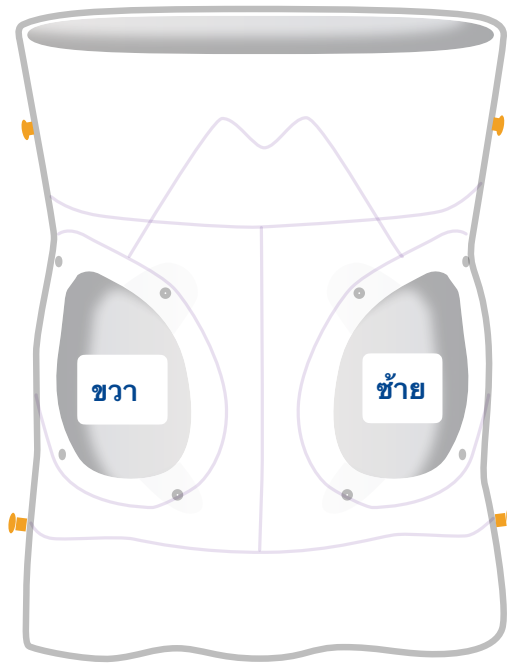


ชั้นส่วนม้าม

60104




ข้างซ้าย

4

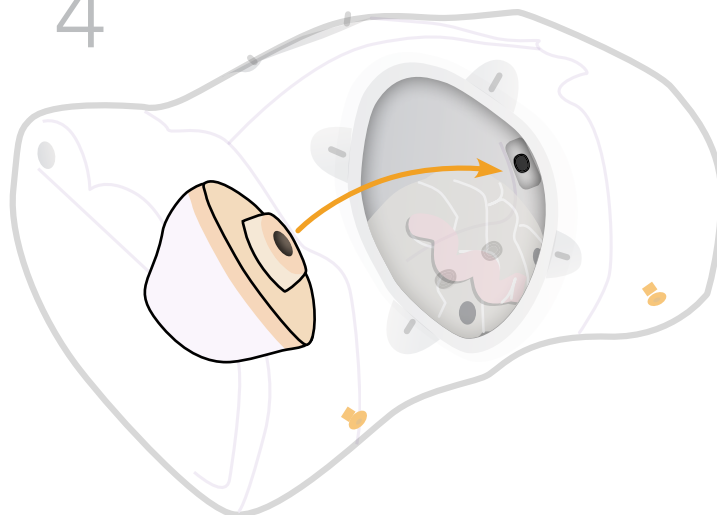



การติดตั้งชั้นเนื้อสำหรับการฝึก

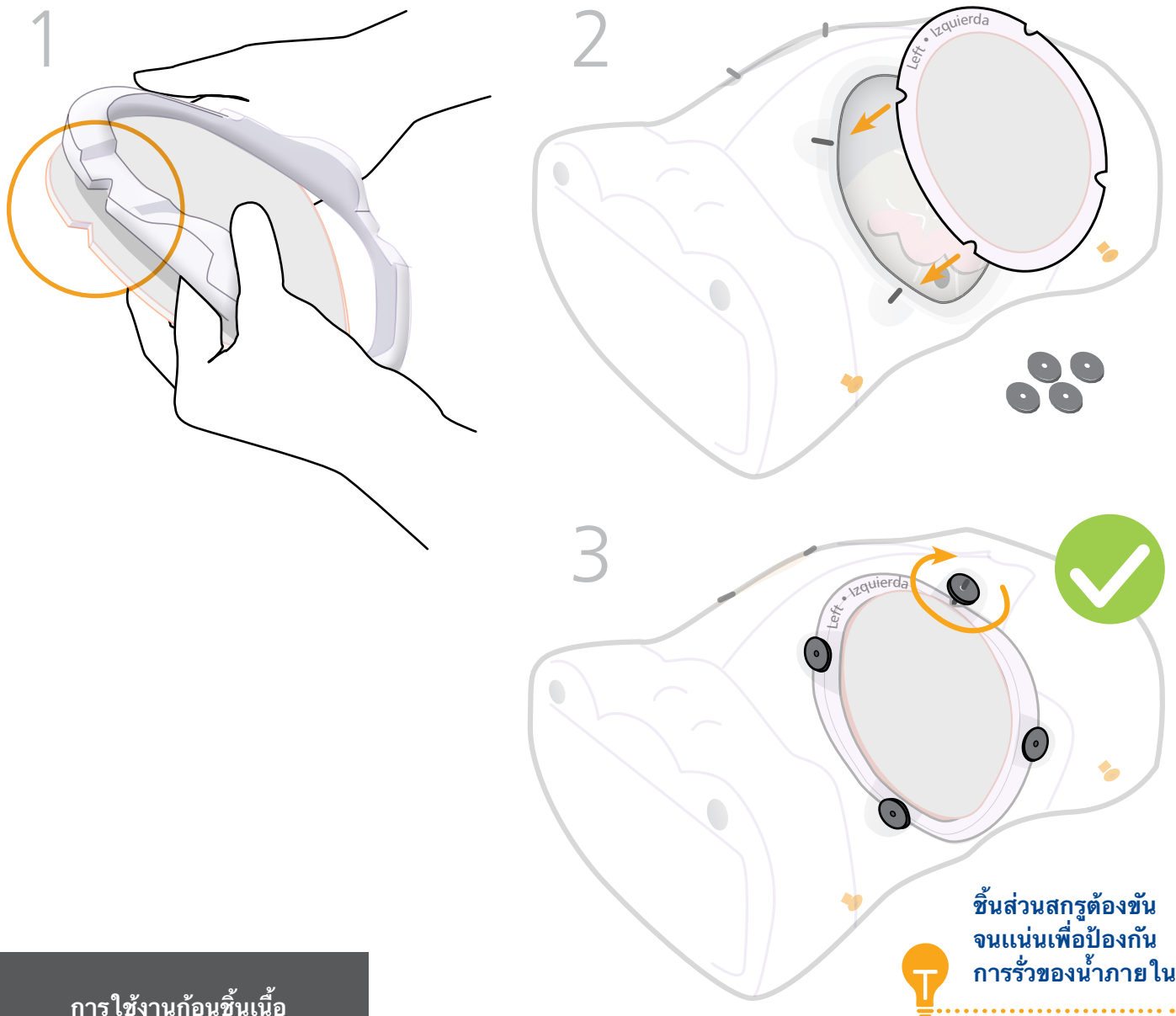


การใช้งานก่อนชั้นเนื้อ

ชั้นเนื้อแต่ละก้อนสามารถรองรับการเจาะได้ประมาณ 200 ครั้ง

100 ครั้ง

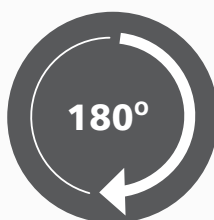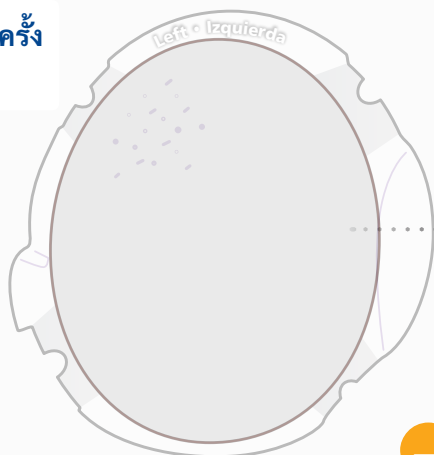


100 ครั้ง

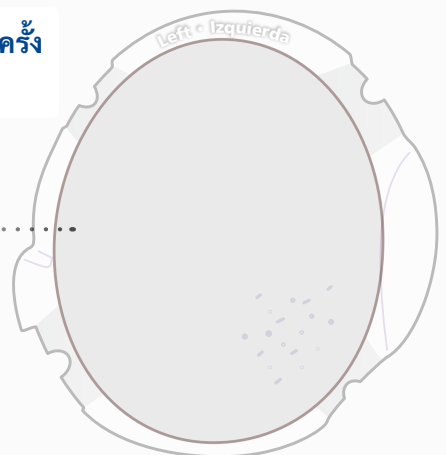




The shelf life can be seen on the bottom of each pad. Performance of the pad could be reduced after this date

เติมน้ำเข้าสู่ระบบ

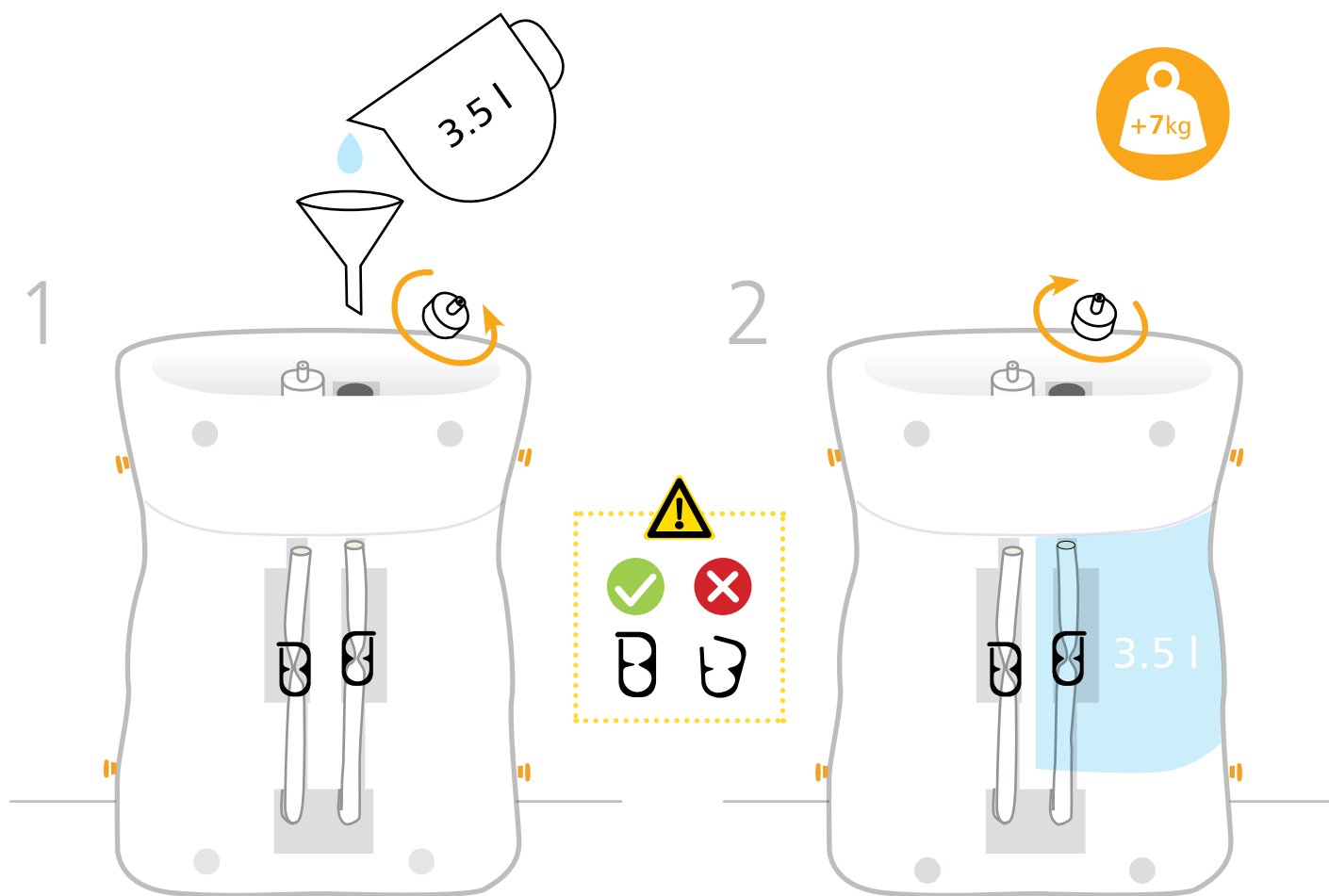

เติมน้ำลงในกระปุกของชุดเติมน้ำเพื่อต่อเข้ากับ หุ่นจำลอง

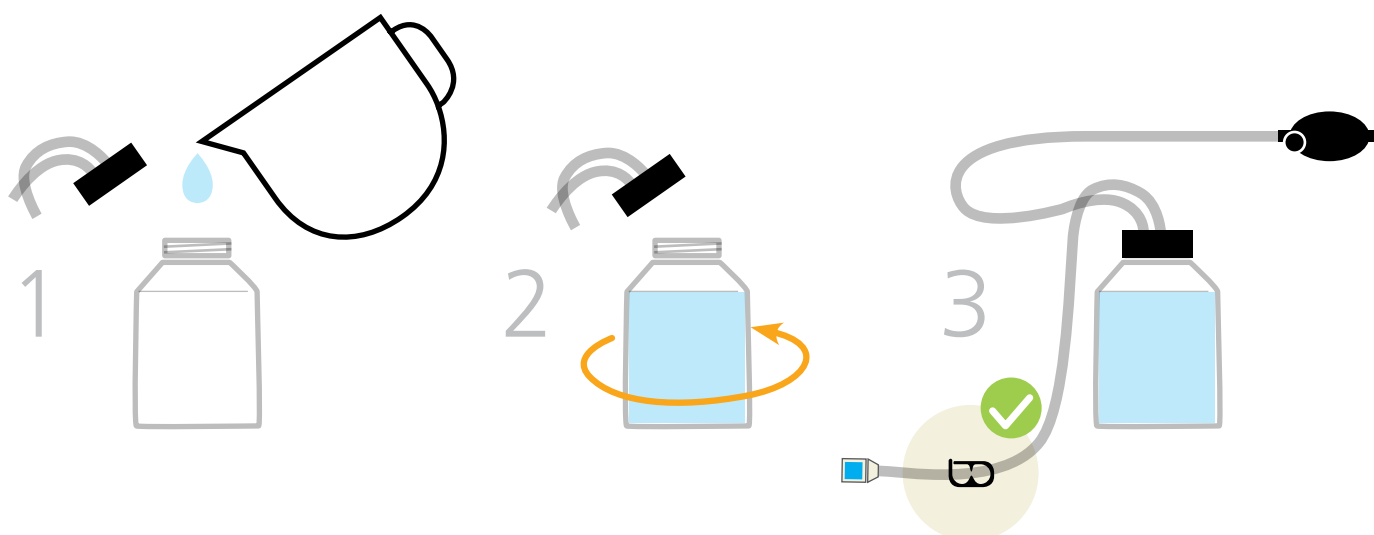

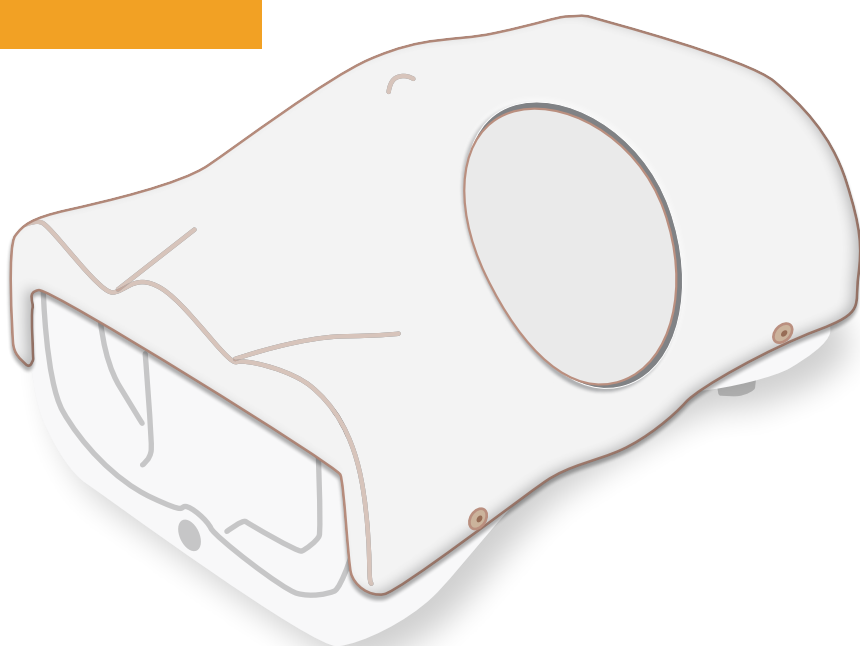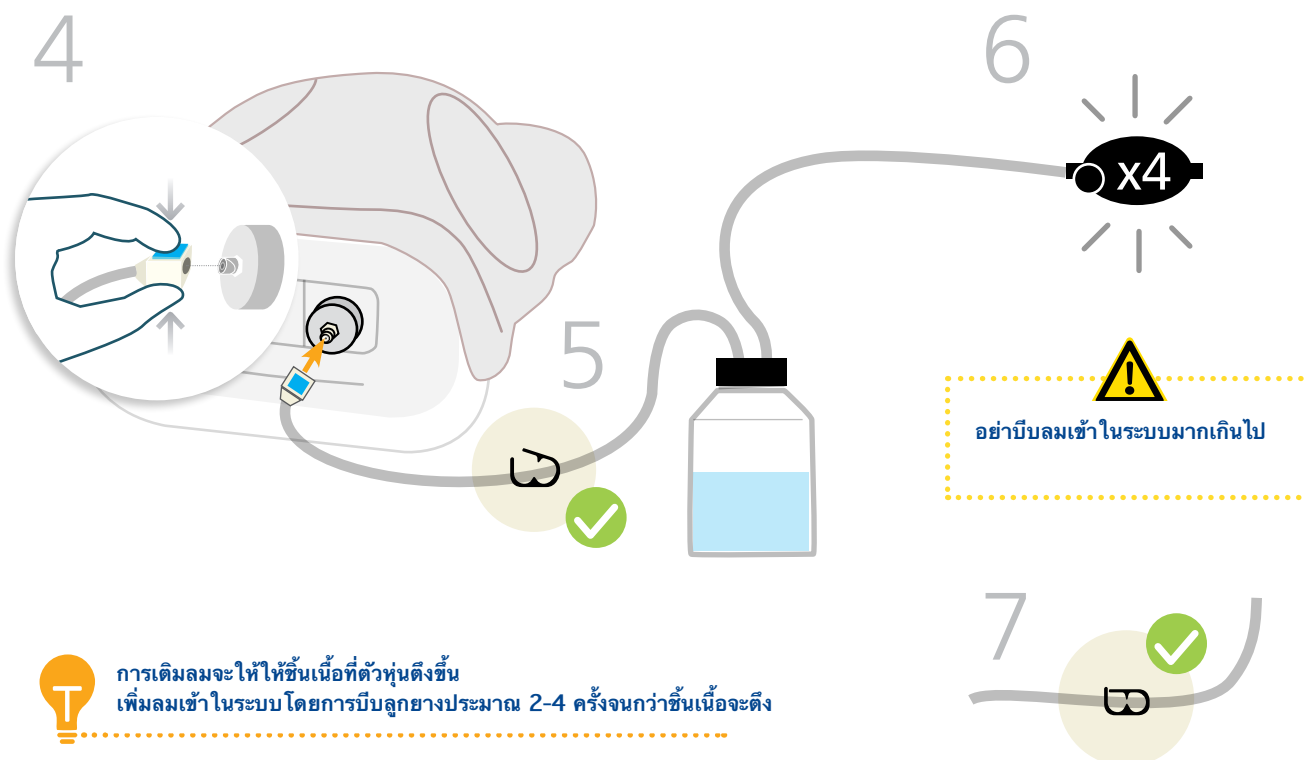


ใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ในการฝึก

DIAGNOSTIC PROCEDURE



THERAPEUTIC PROCEDURE

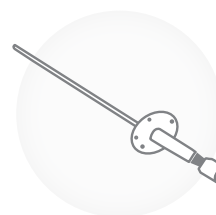


ULTRASOUND PROCEDURE




TAKE A LOOK AT OUR
PARACENTESIS TRAINER VIDEO

VISIT THE WEBSITE
limbsandthings.com
OR YOUTUBE CHANNEL
youtube.com/limbsandthings

การทำความสะอาด
และเก็บรักษา

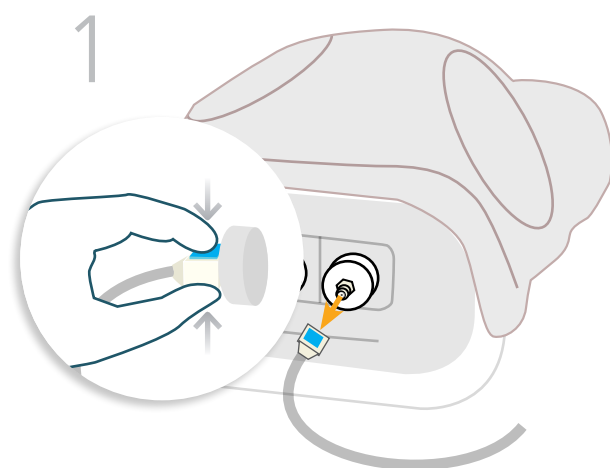

เอียงท่อนเล็กน้อยเพื่อระบายน้ำออกให้หมด

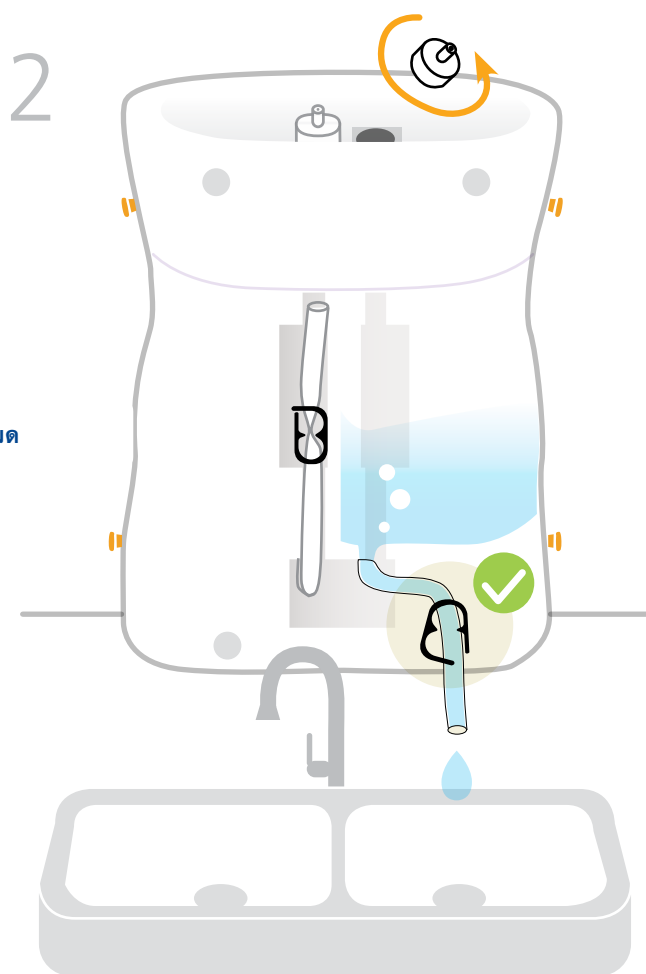

YOU MAY
ALSO BE
INTERESTED IN...

CHEST DRAIN
& NEEDLE
DECOMPRESSION
TRAINER

60230

61230



ABDOMINAL
EXAMINATION
TRAINER

60000

60054



CATHETERIZATION
TRAINERS

60850

60870

60851

60869

60852

60873

60853

60871

60854

60872



Part No: 365-019

Issue 01, August 2020
© 2020 Limbs & Things

